




TORONTO EVOLUTA CARICO IMMEDIATO

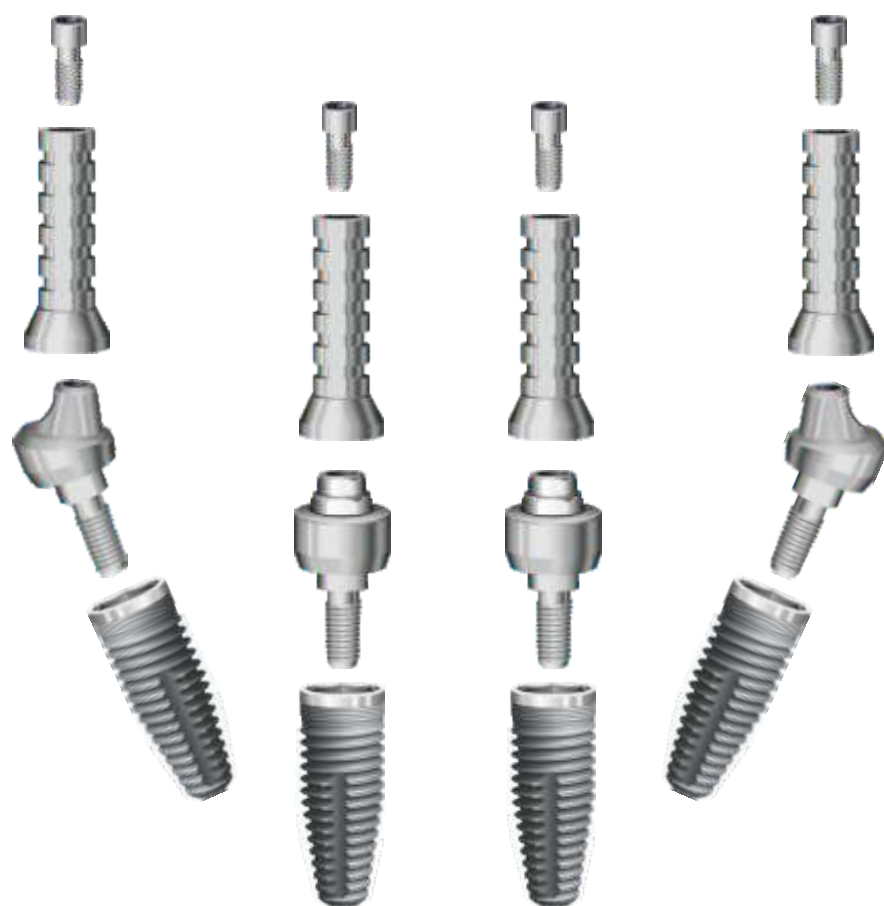


LA RIABILITAZIONE PROTESICA
SECONDO LA TECNICA ALLON4

ALL ON FOUR ALL ON SIX


**SURGICAL TECHNIQUE THAT
FASCINATES THE WORLD**

BASIC RULES

WHERE TO PLACE THE IMPLANTS

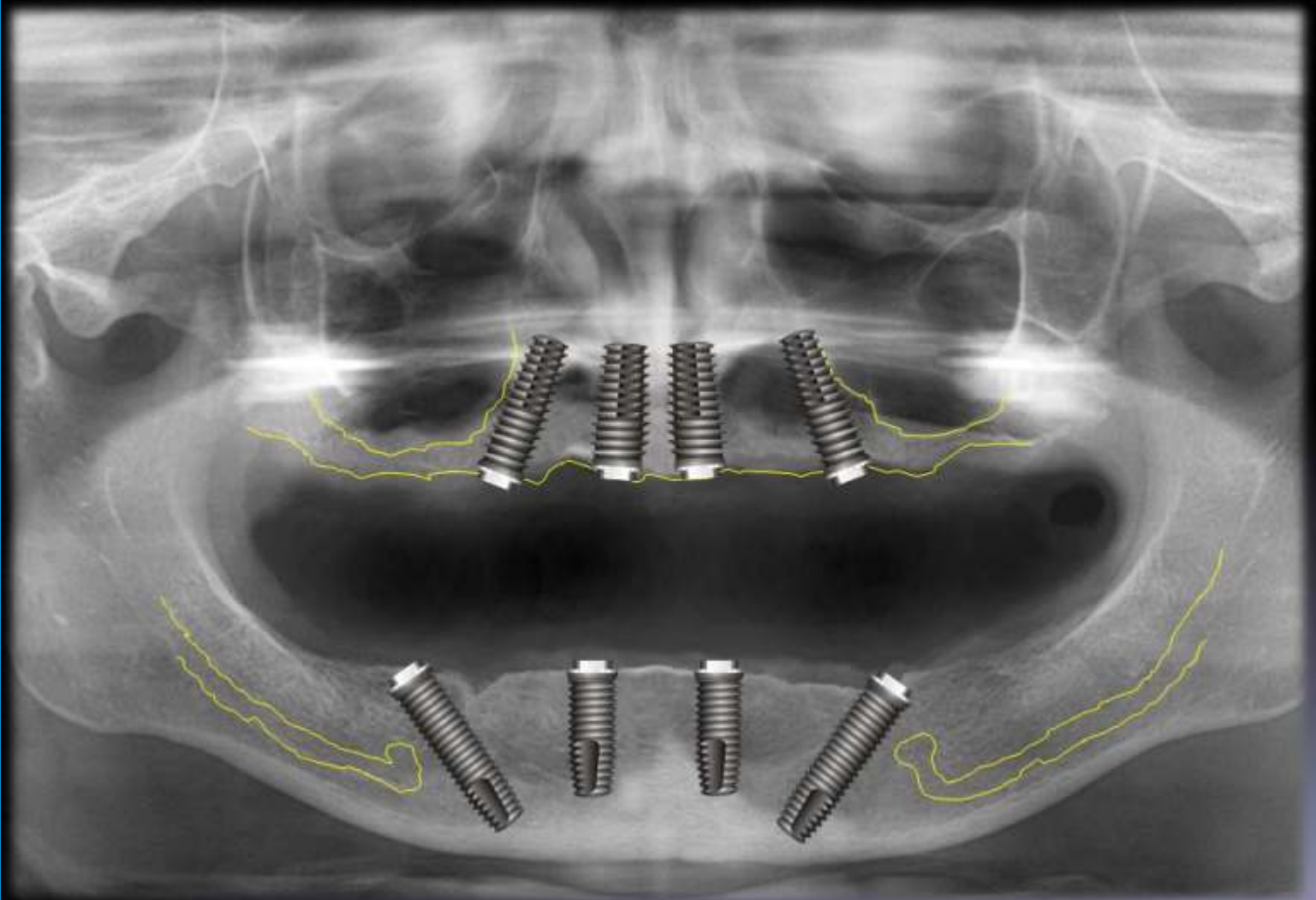


**RISPETTO DEL SENO
MASCELLARE**

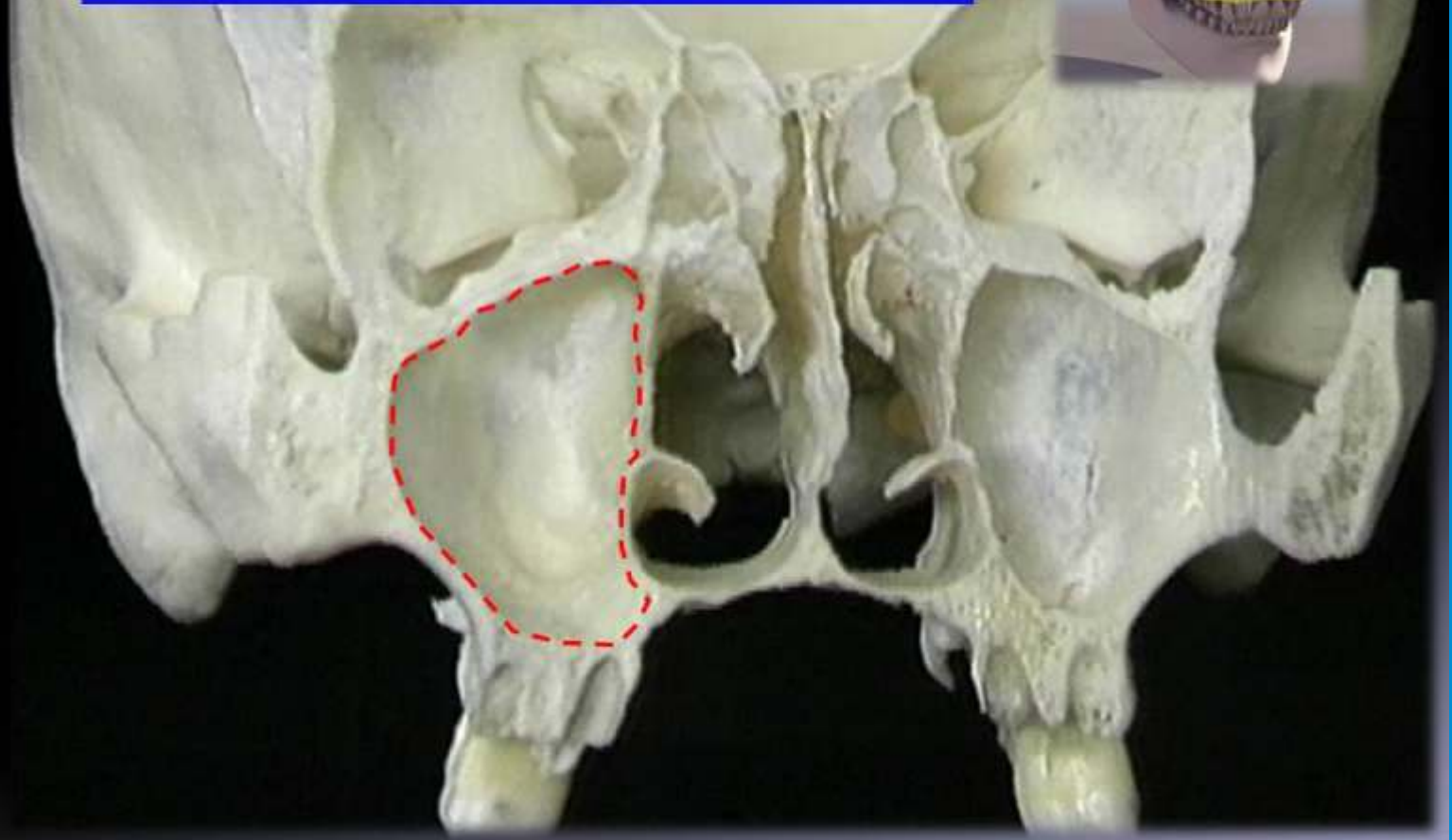

**INSERIMENTO IMPIANTI
POSTERIORI ANGOLO 30°**




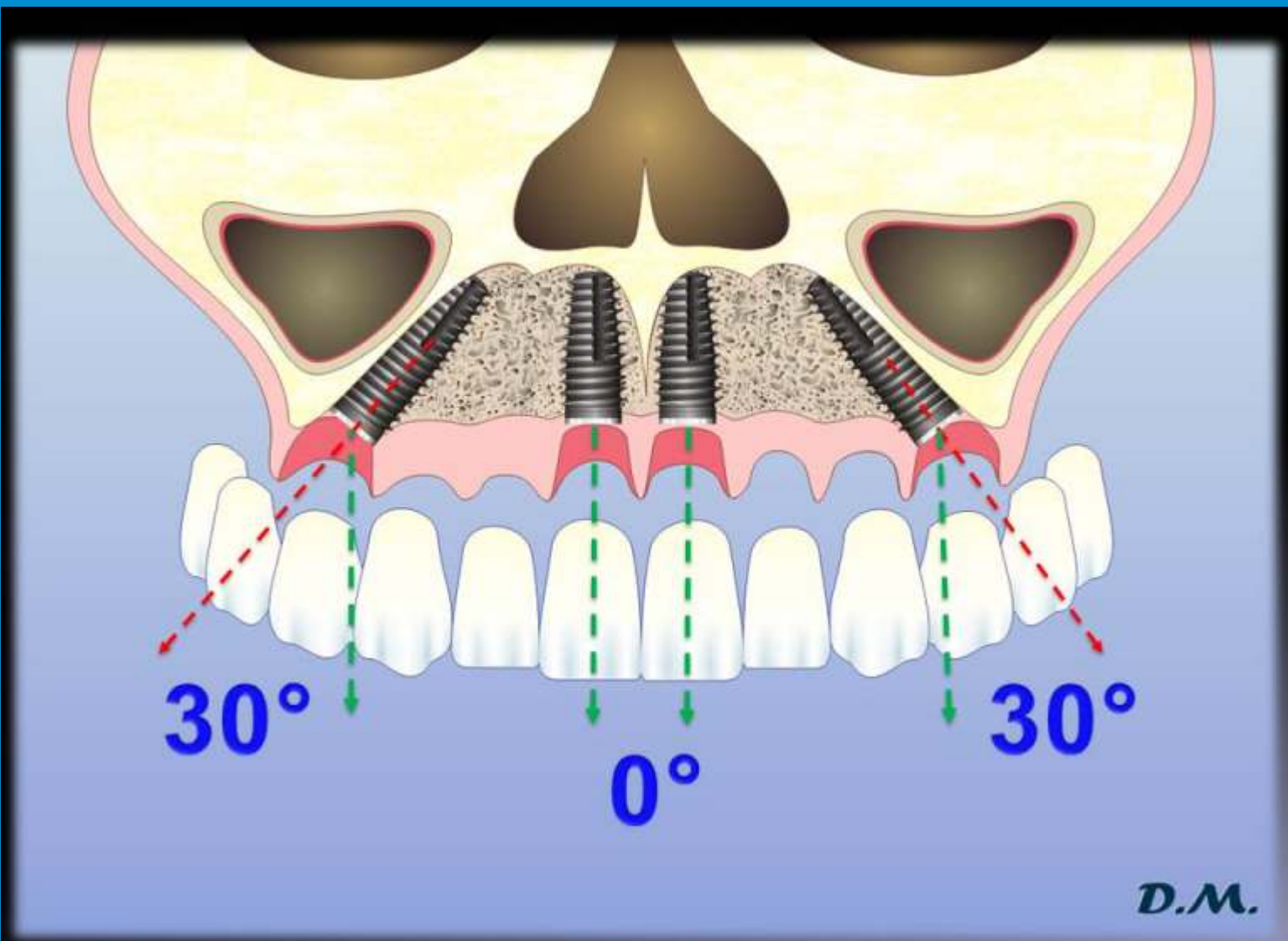


**RISPETTO EMERGENZA
DEL NERVO ALVEOLARE**




**INSERIMENTO IMPIANTI
POSTERIORI ANGOLO 30°**

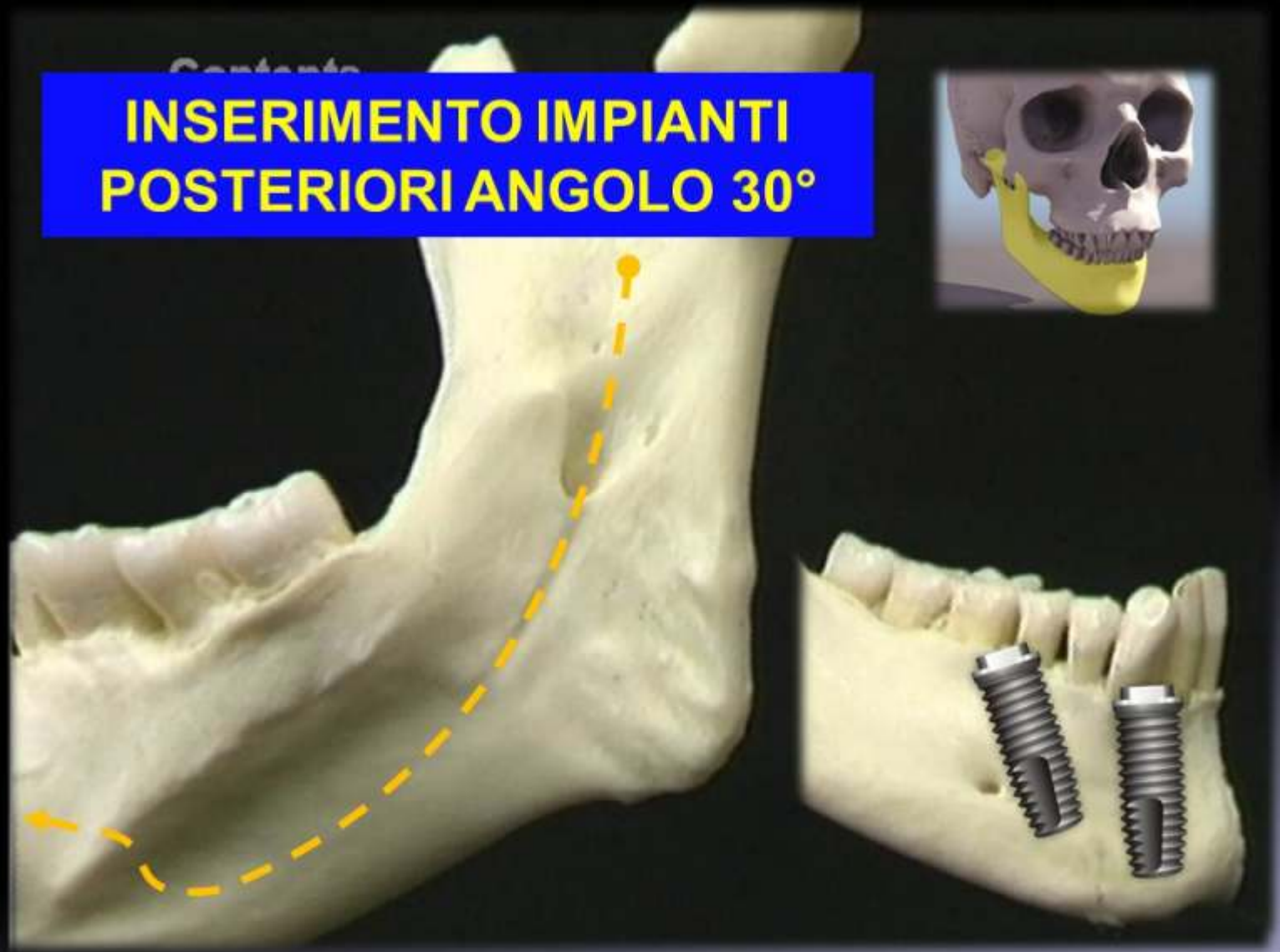

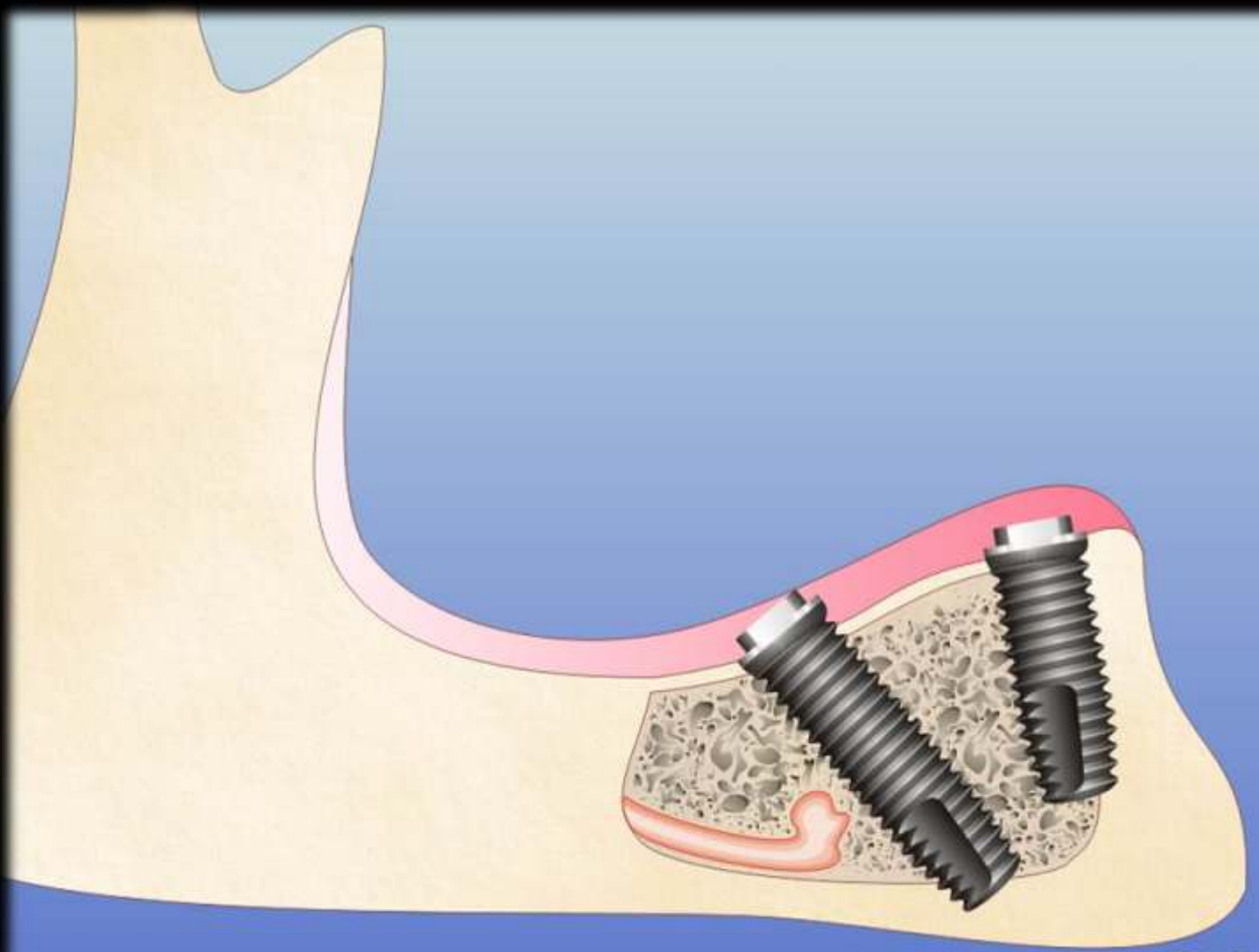

D.M.

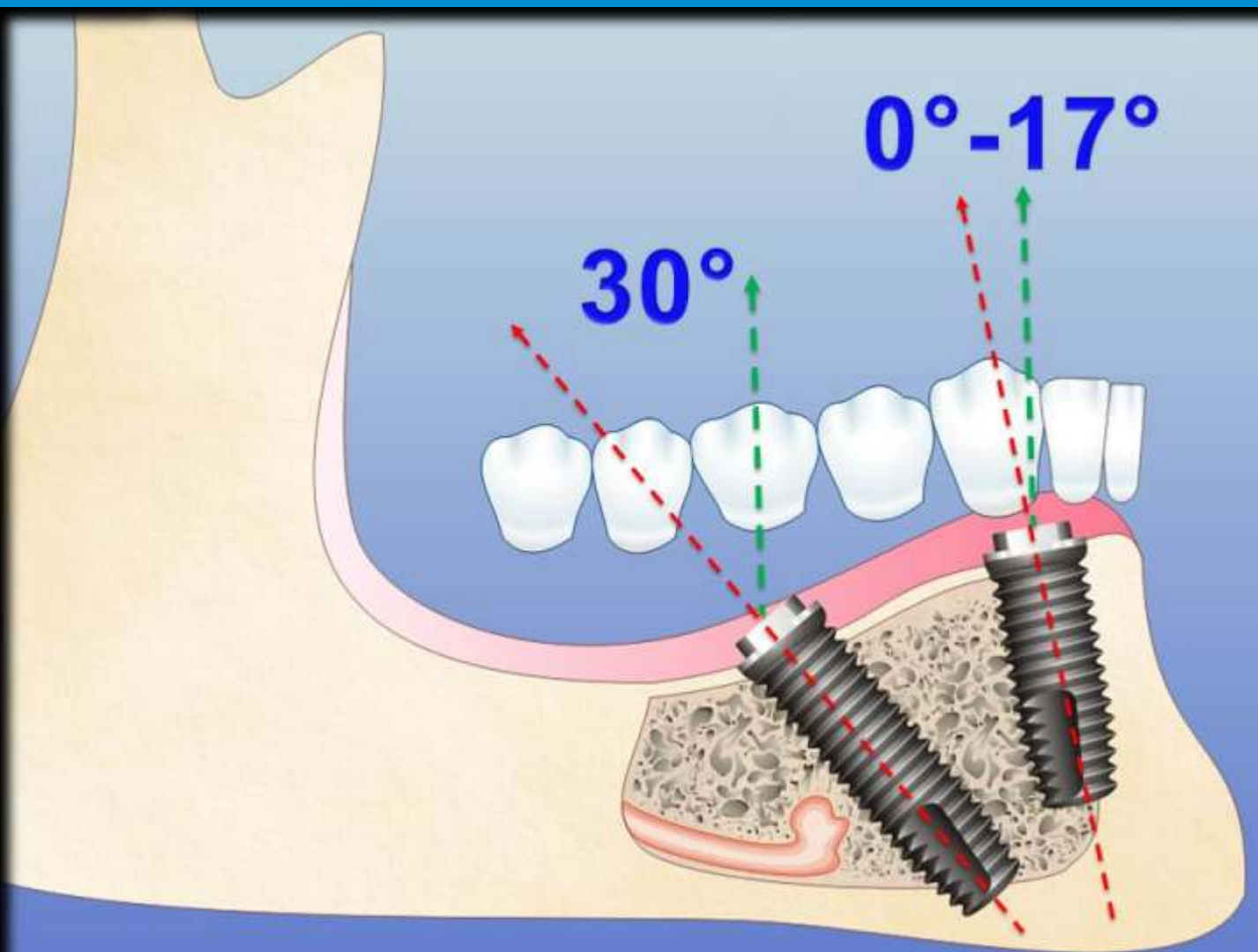


D.M.

CORREZIONE ANGOLARE

PER MEZZO DI PARTICOLARI
ABUTMENT

M.U.A

Multi Unit Abutment

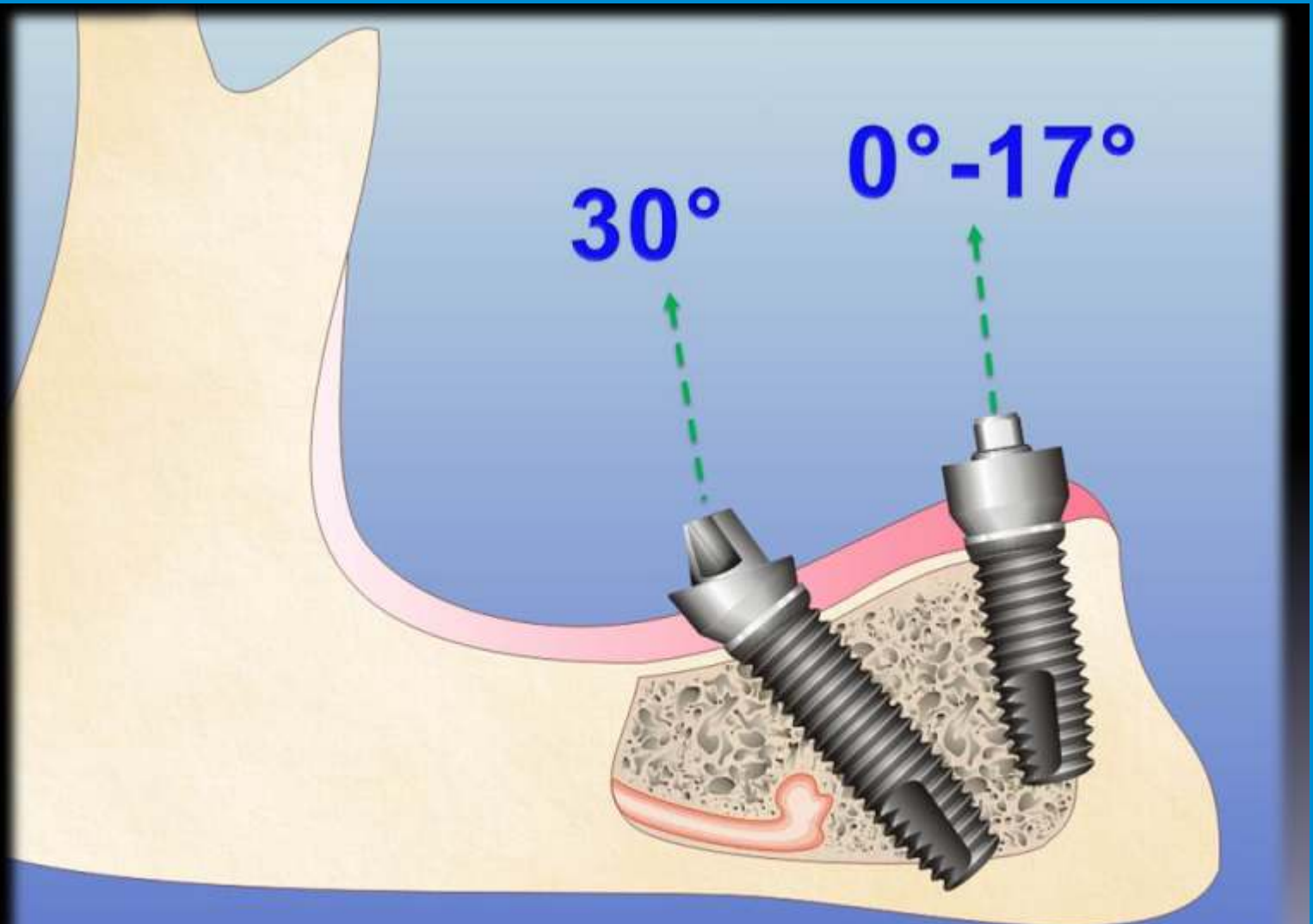

D.M.

EXTERNAL HEXAGON

CYLINDER AND TAPERED



CYLINDER

K-TAPERED

SHORT




(SE) IMPLANT WIS

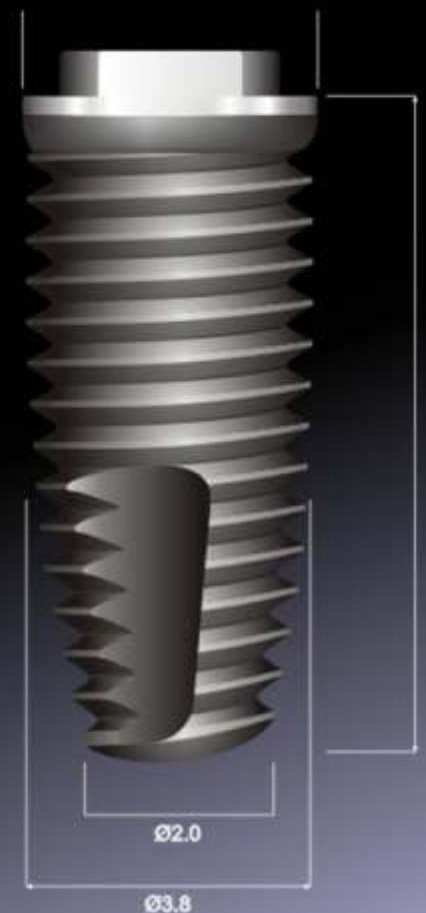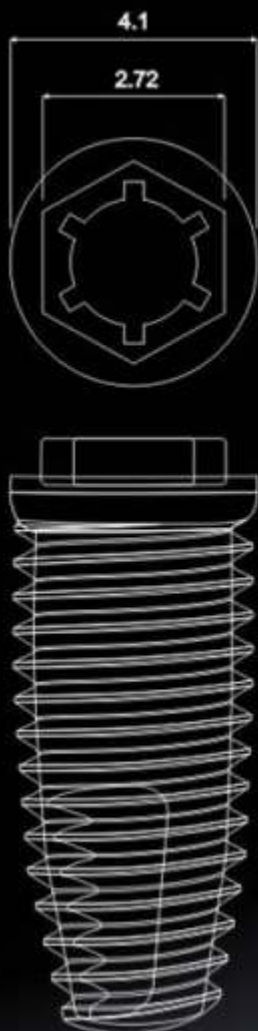

CODE	A	B	C	D
SE 4008	8.5mm			
SE 4010	10mm			
SE 4011	11.5mm			
SE 4013	13mm			
SE 4015	15mm			
SE 4018	18mm			

INTERNAL HEXAGON

CYLINDER

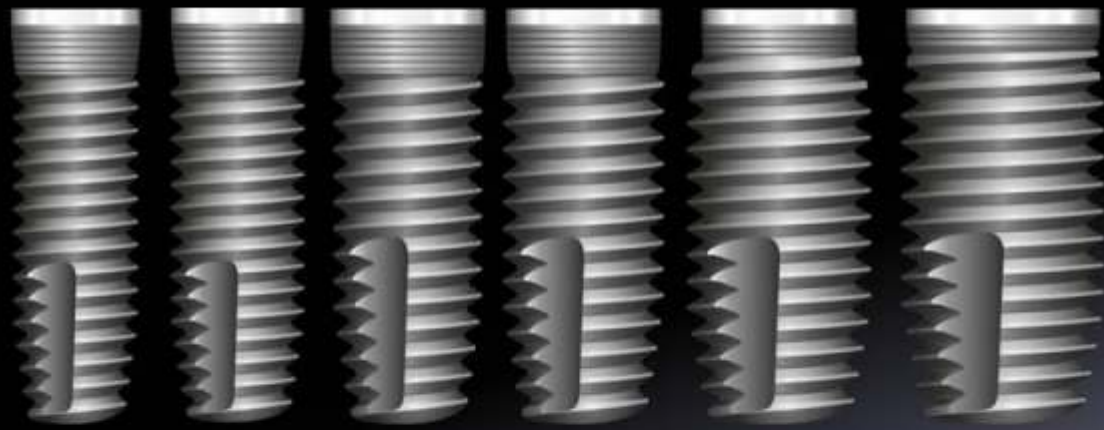

3.0

3.4

3.8


4.2

4.6

5.0

INTERNAL HEXAGON

TAPERED

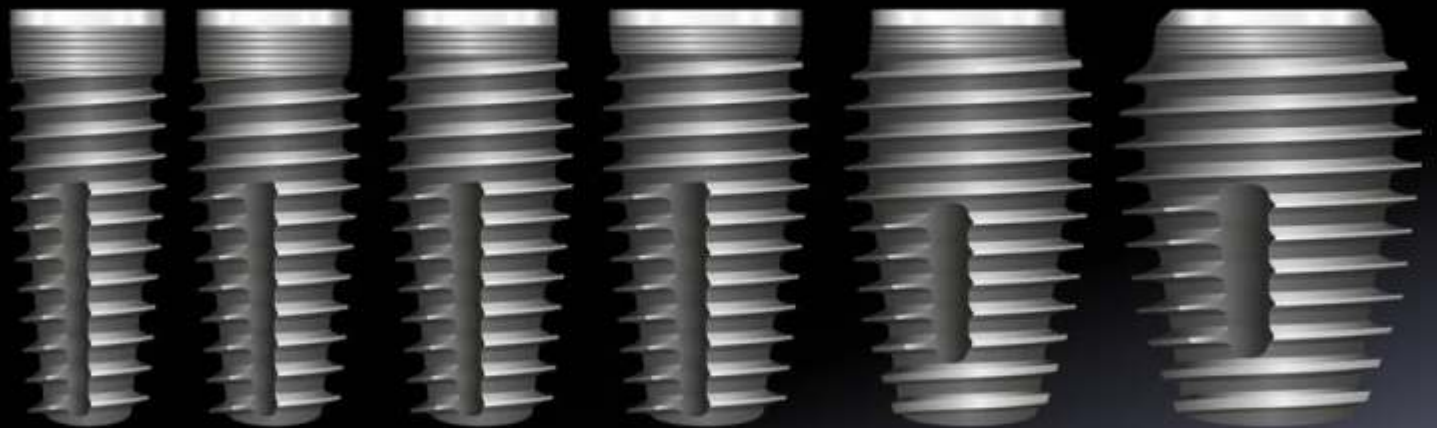

3.8

4.2

4.6

5.0


6.0

8.0

MUA

DIRITTI


0°

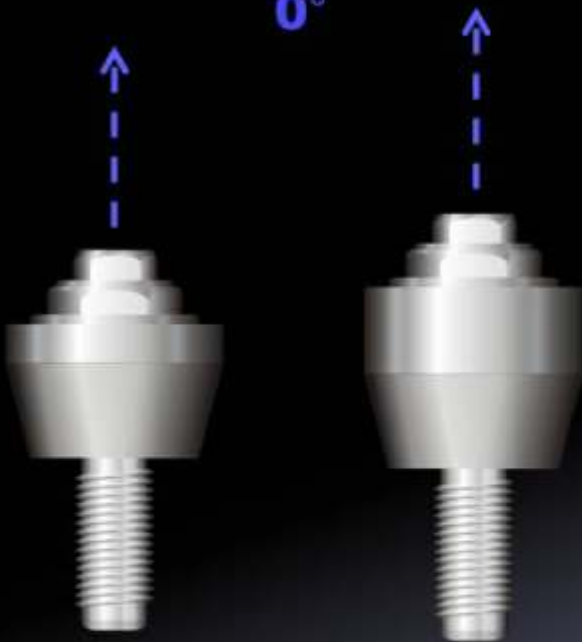

ANGOLATI


30°

17°

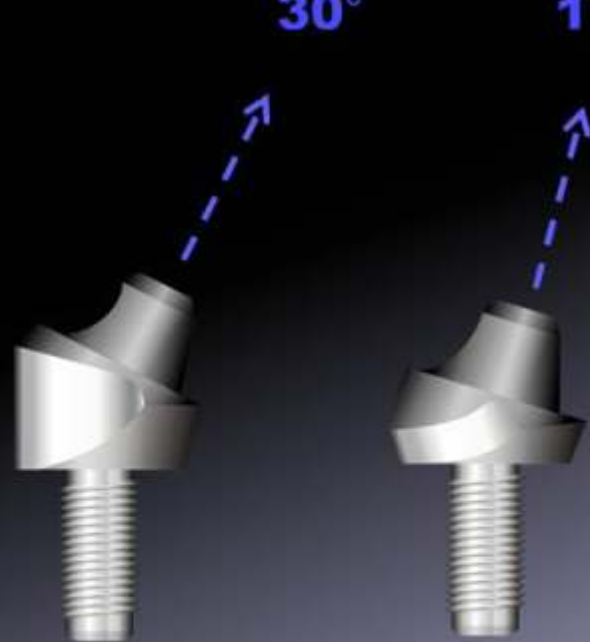


DRIVER

MANUALE

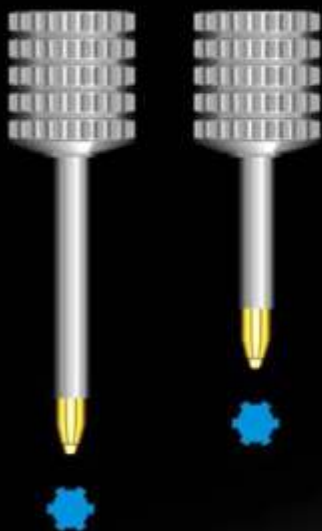

MECCANICO

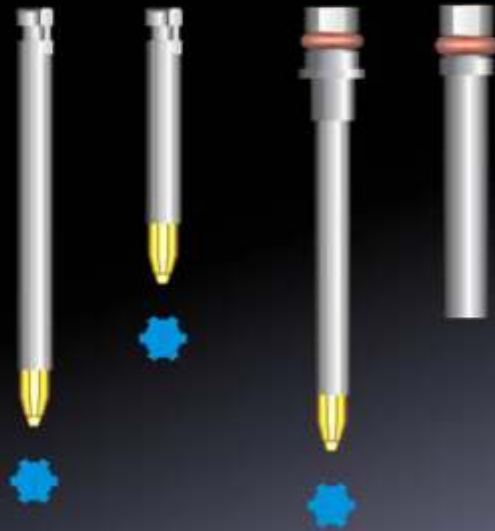

PROSTHETIC

**TEMPORARI
ABUTMENT**



TRANSFER



PROSTHETIC

**MONCONE
CALCINABILE**



**ANALOGO
LABORATORIO**




CASE REPORT


ALL ON 4

MAXILLA


TAGLIO IN CRESTA

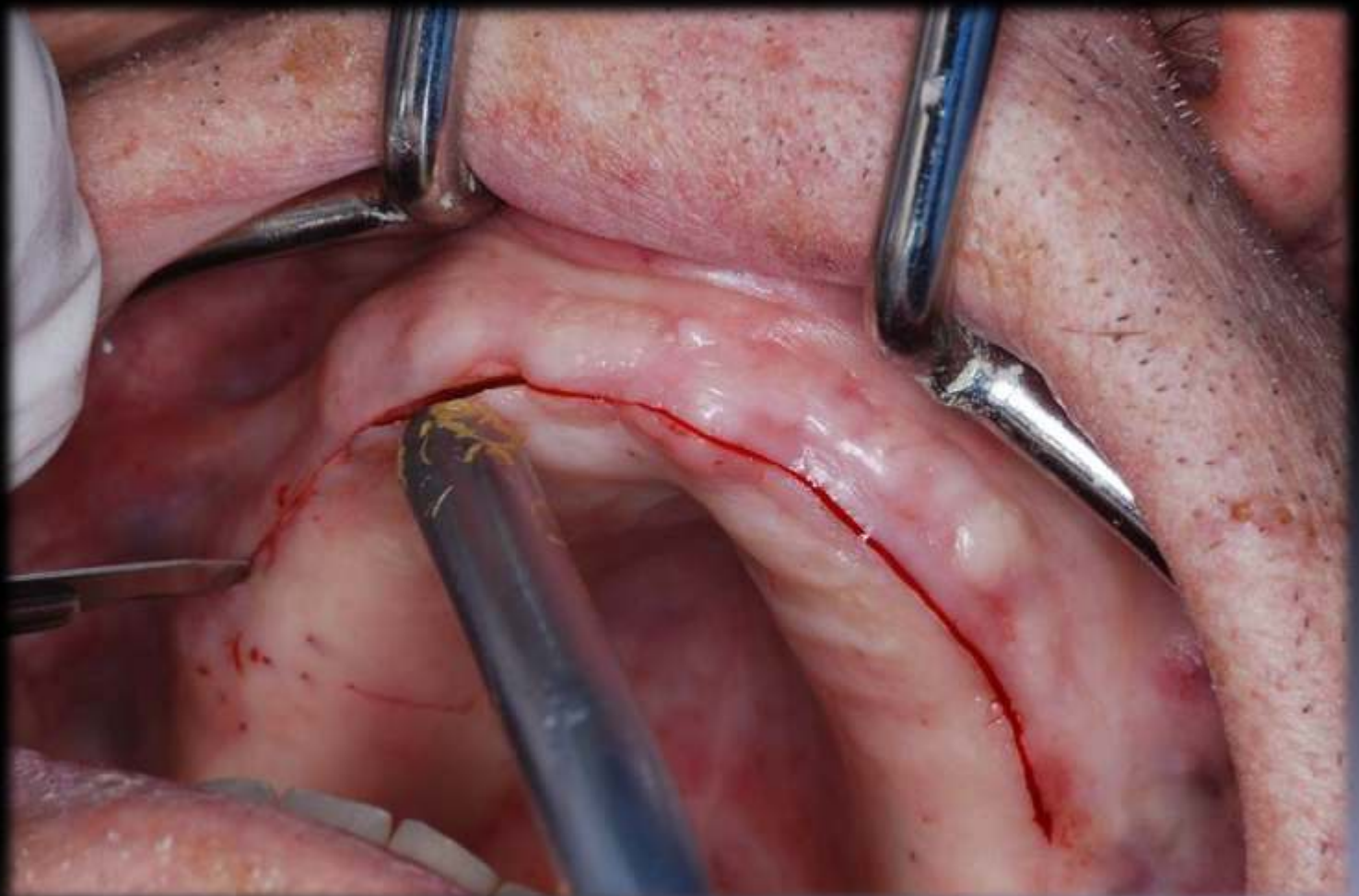


LEMBO A SPESSORE TOTALE

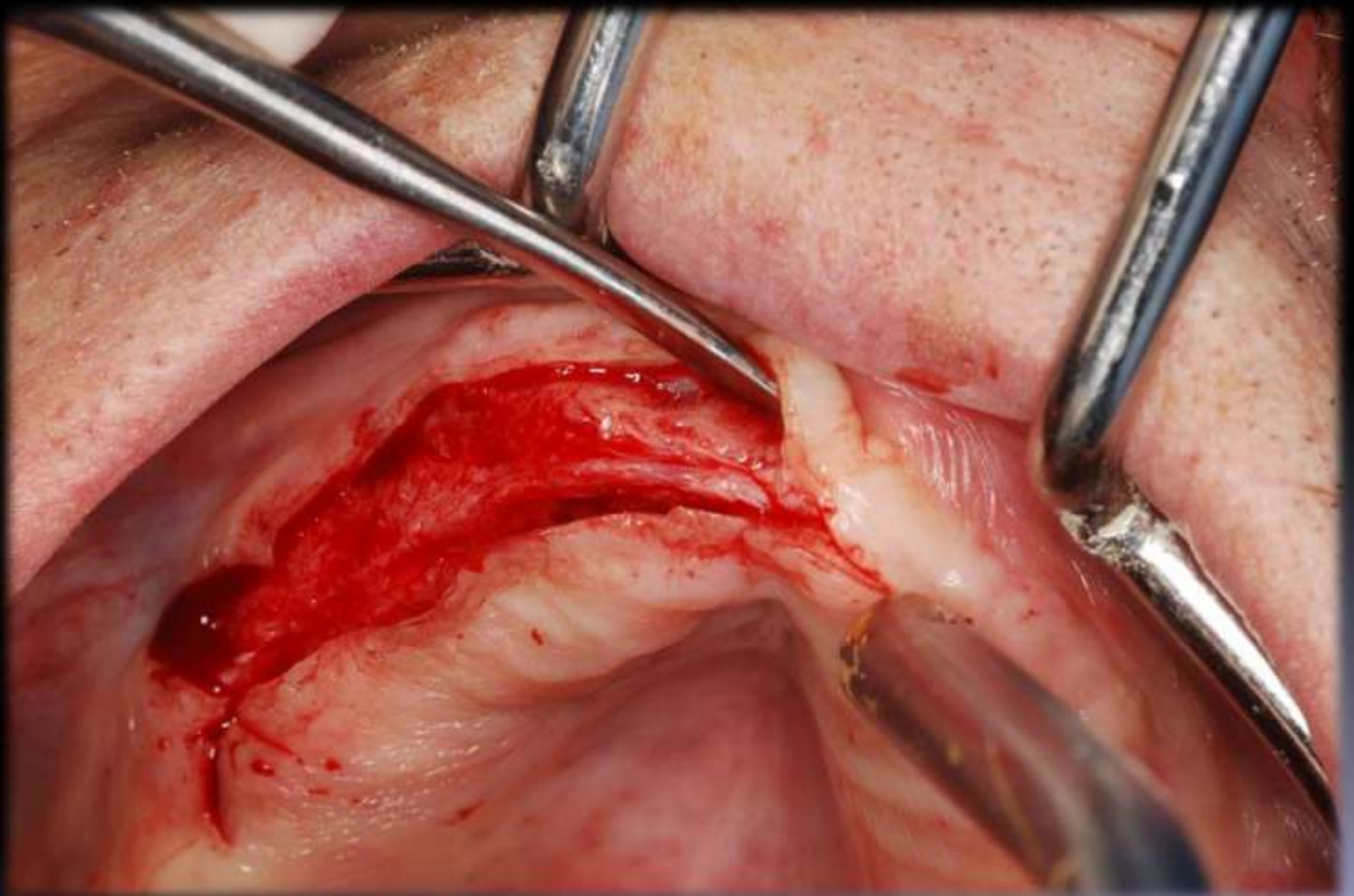


LEMBO A SPESSORE TOTALE


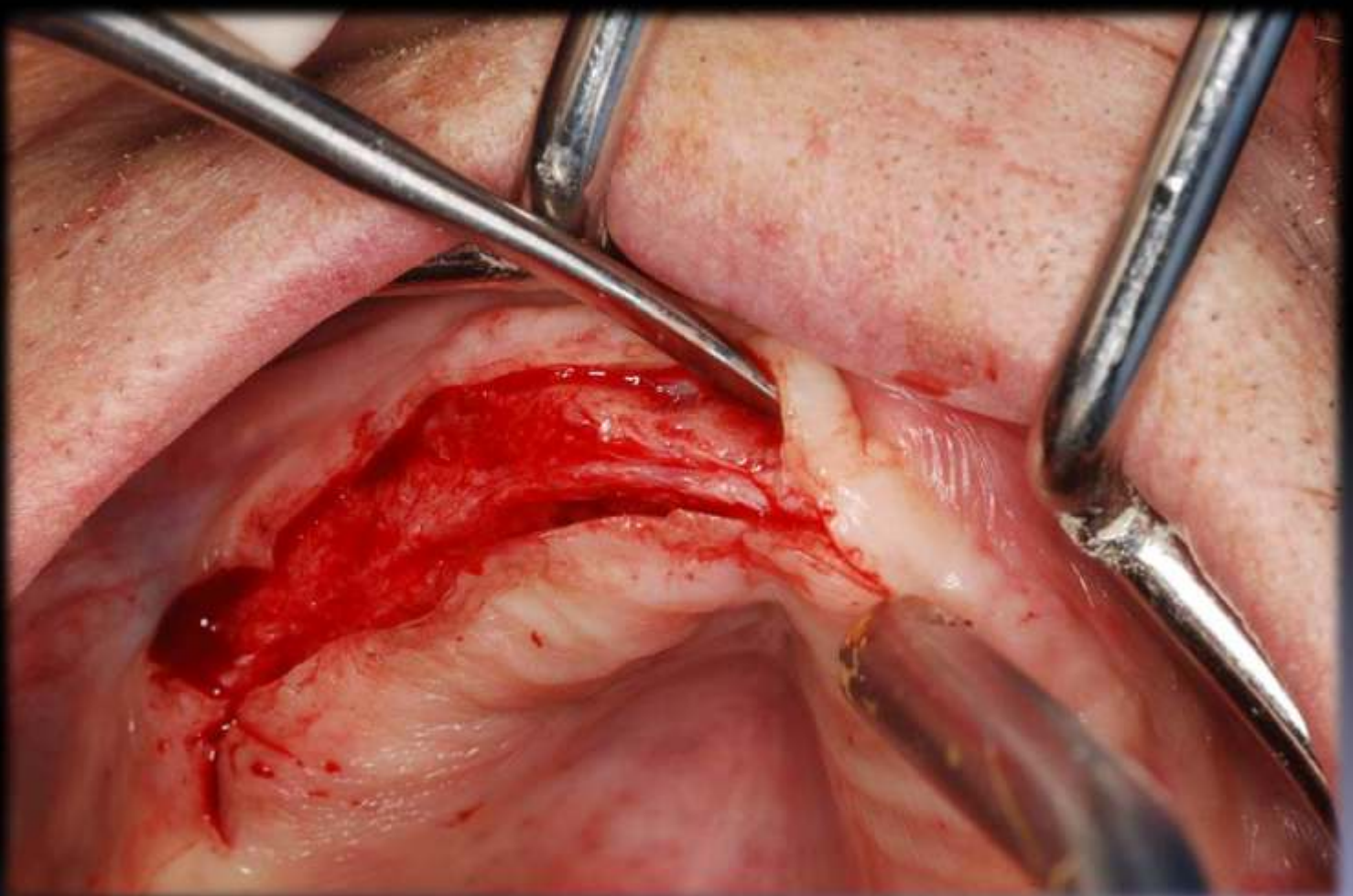




SCOLLARE IL LEMBO VESTIBOLARE




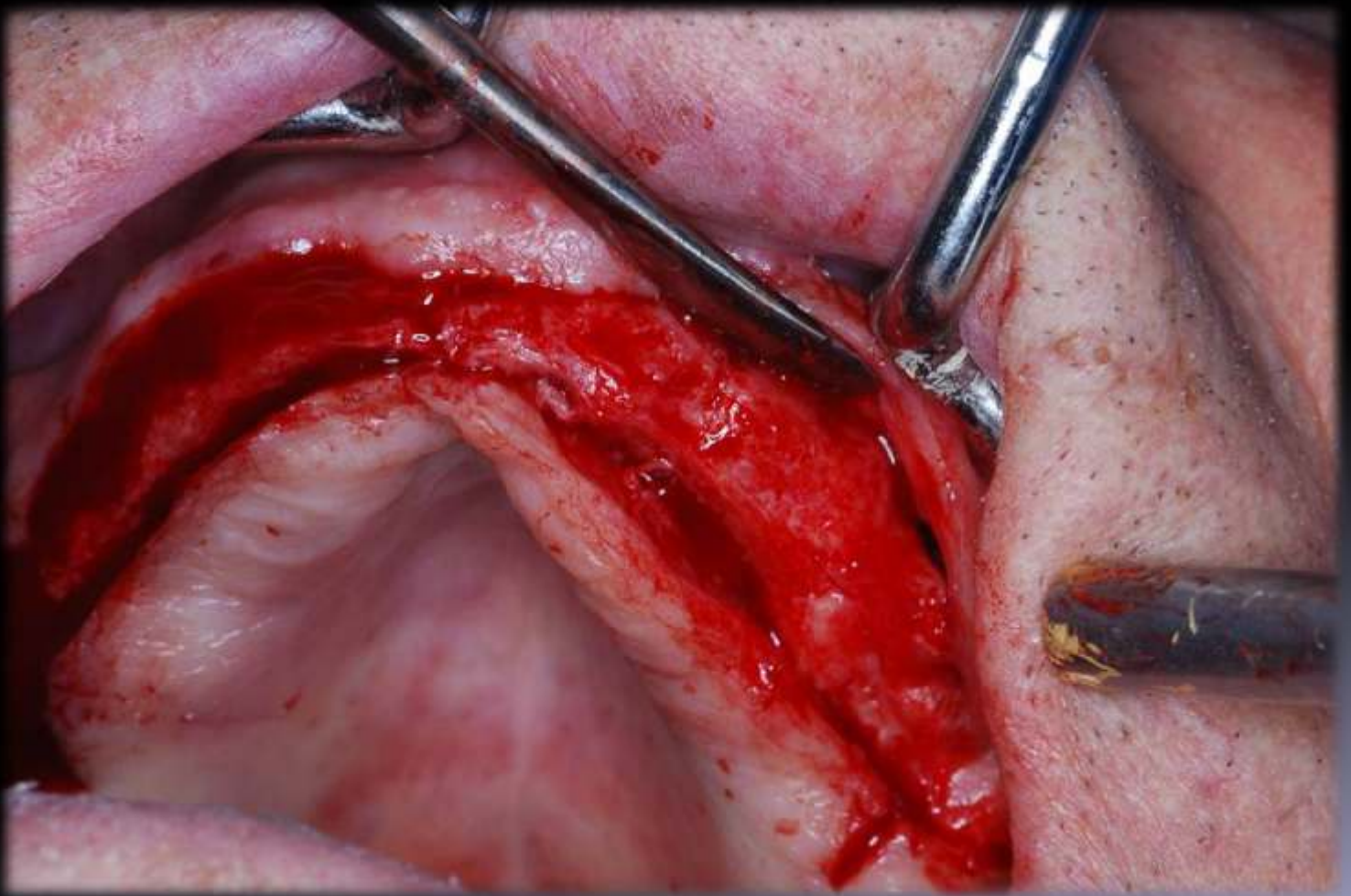




OSTEOPLASTICA



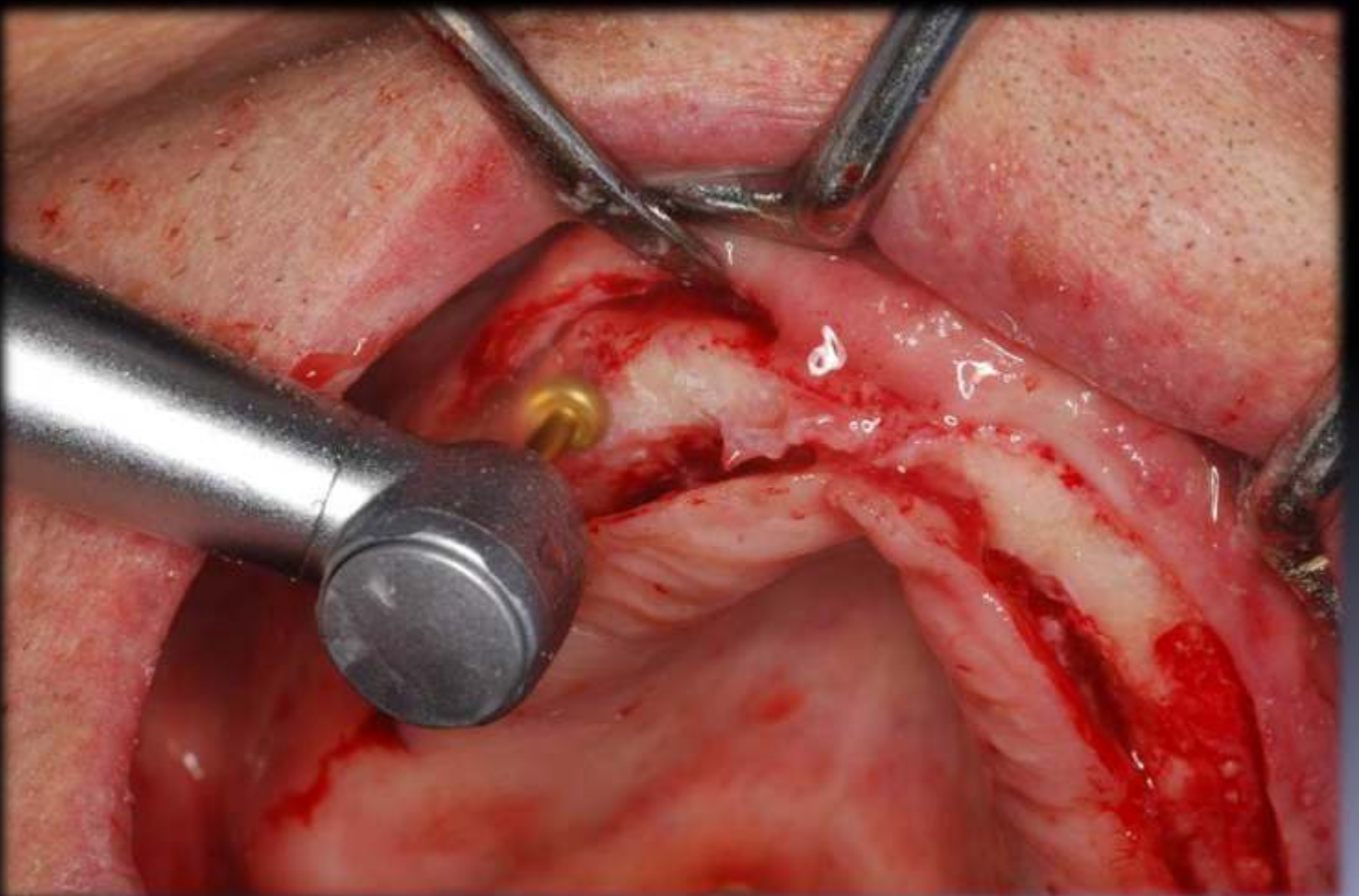




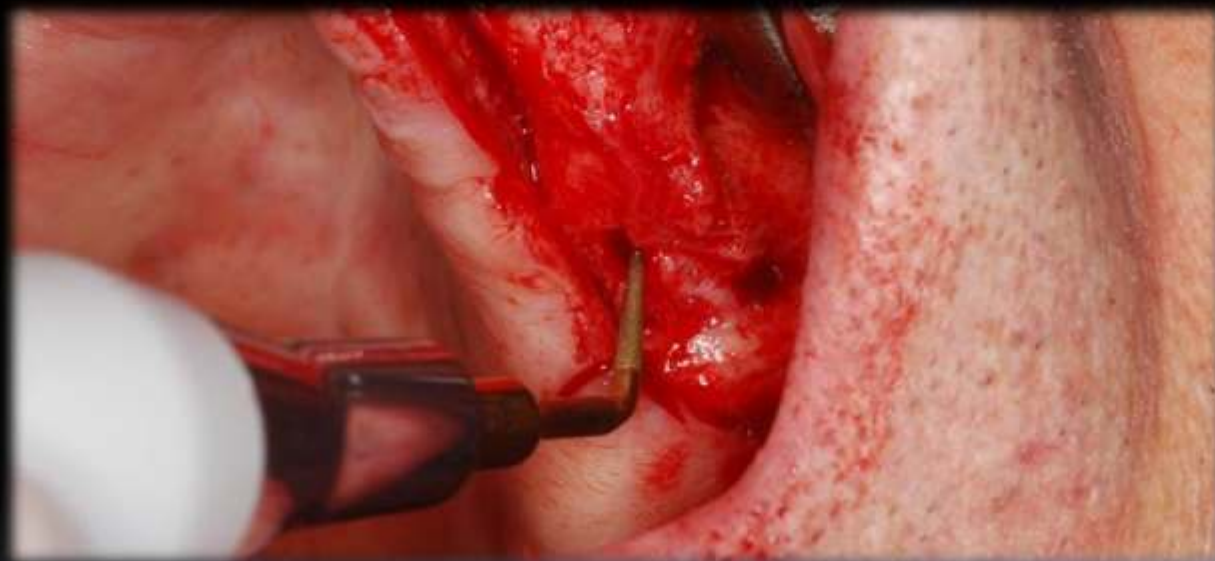
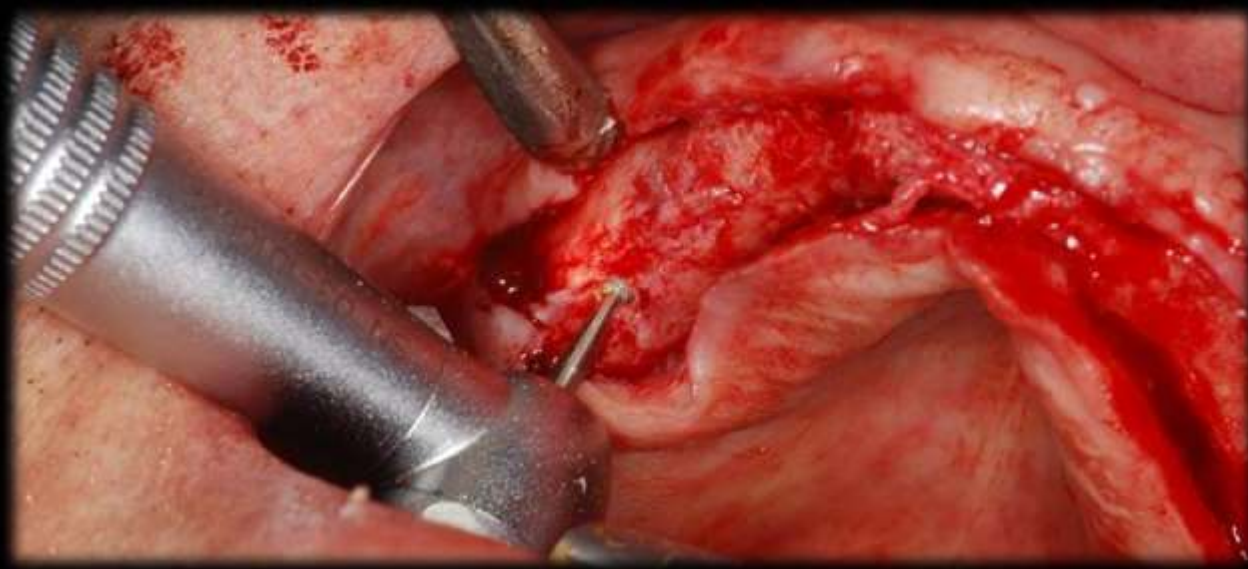


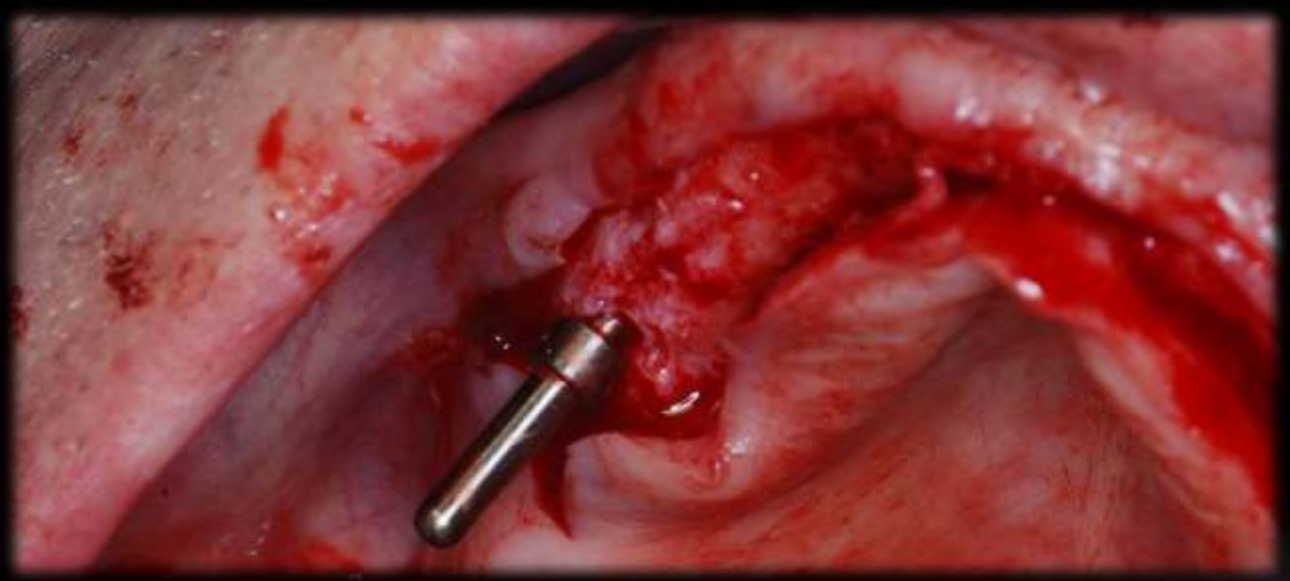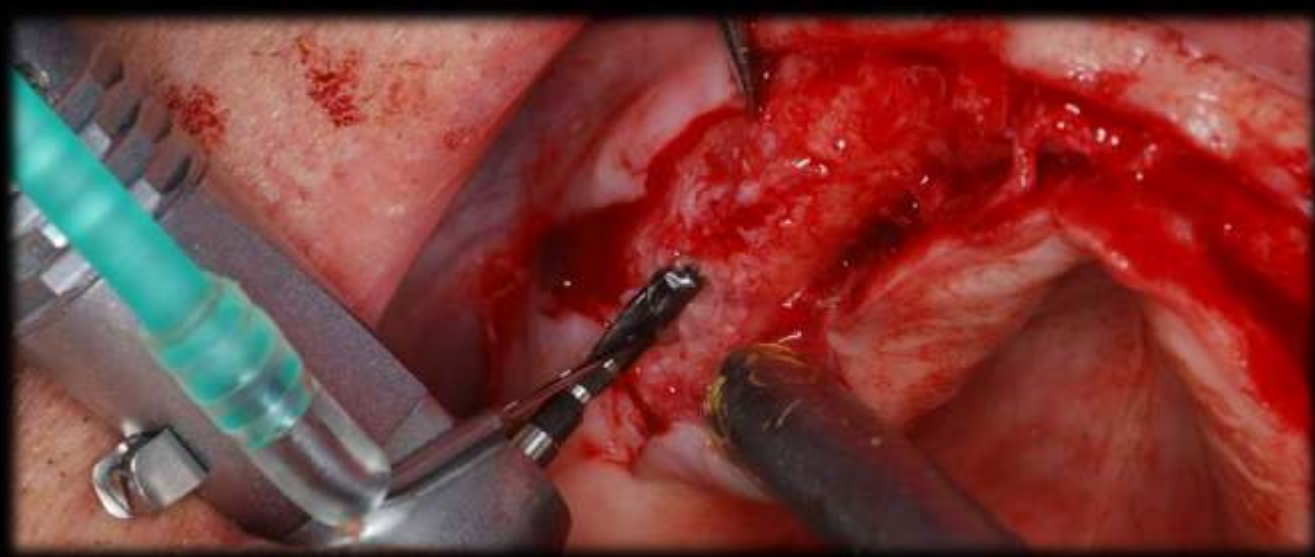

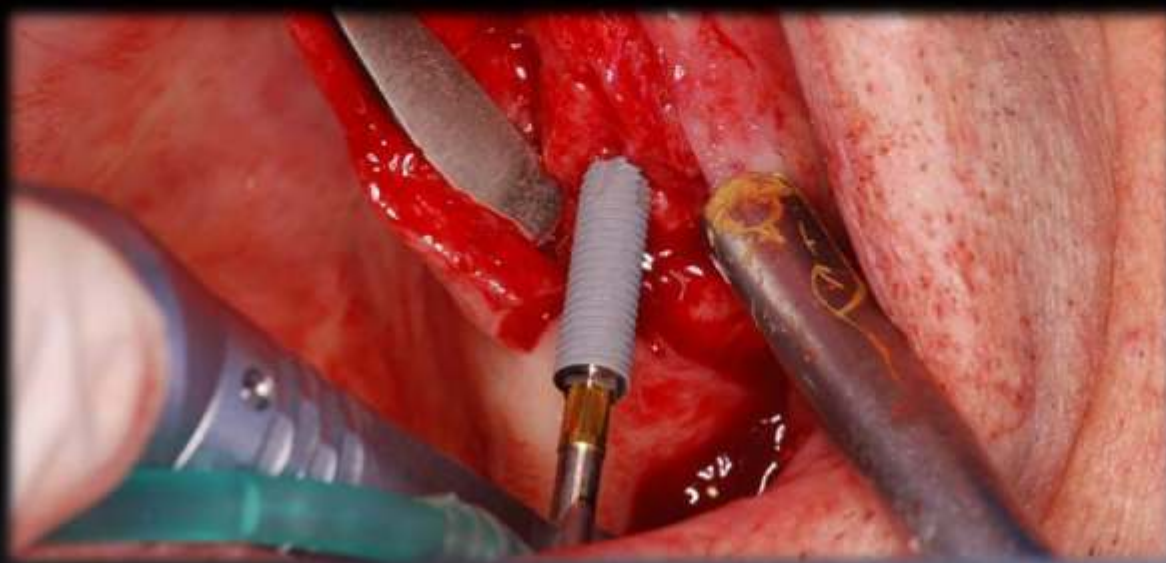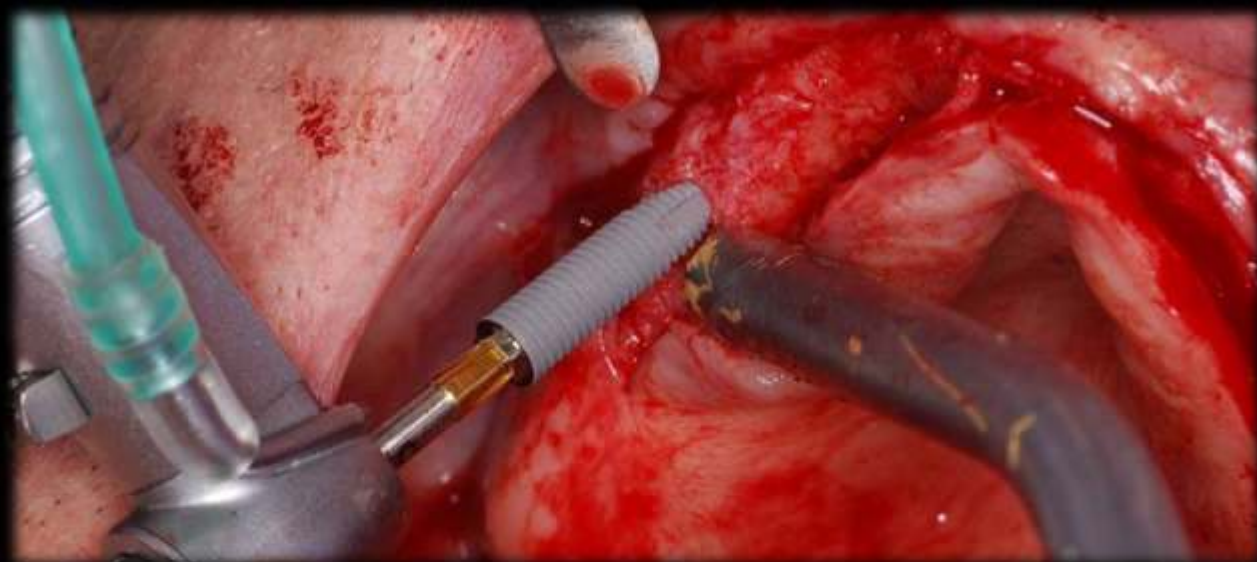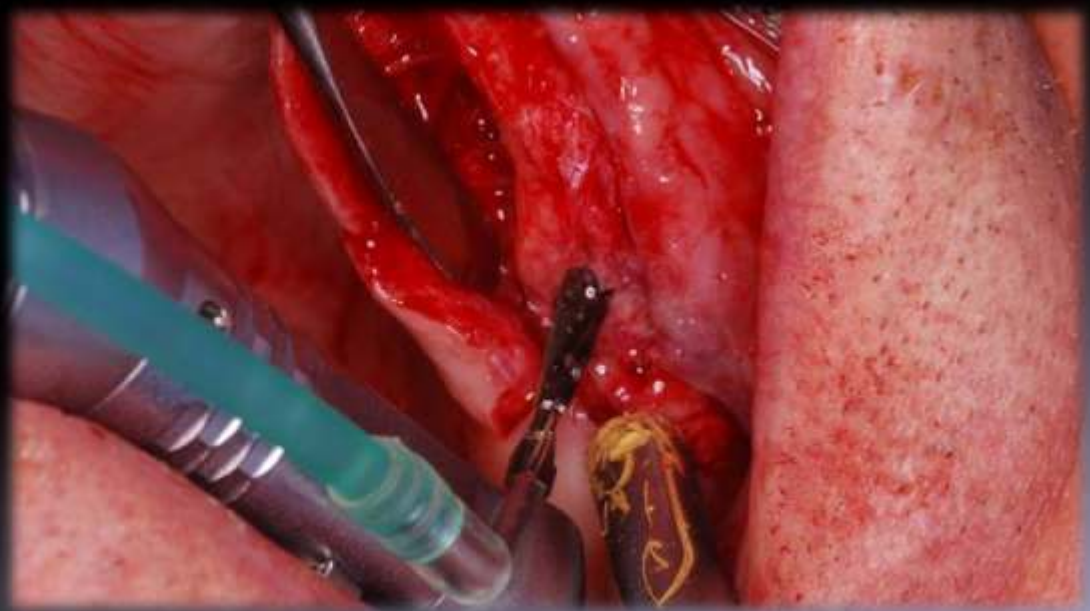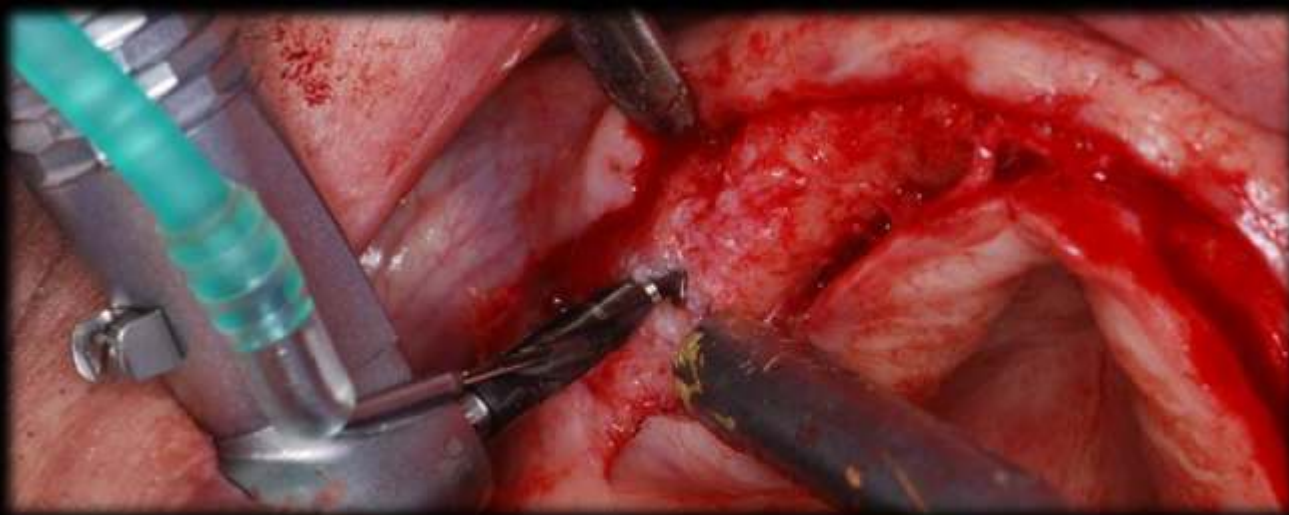

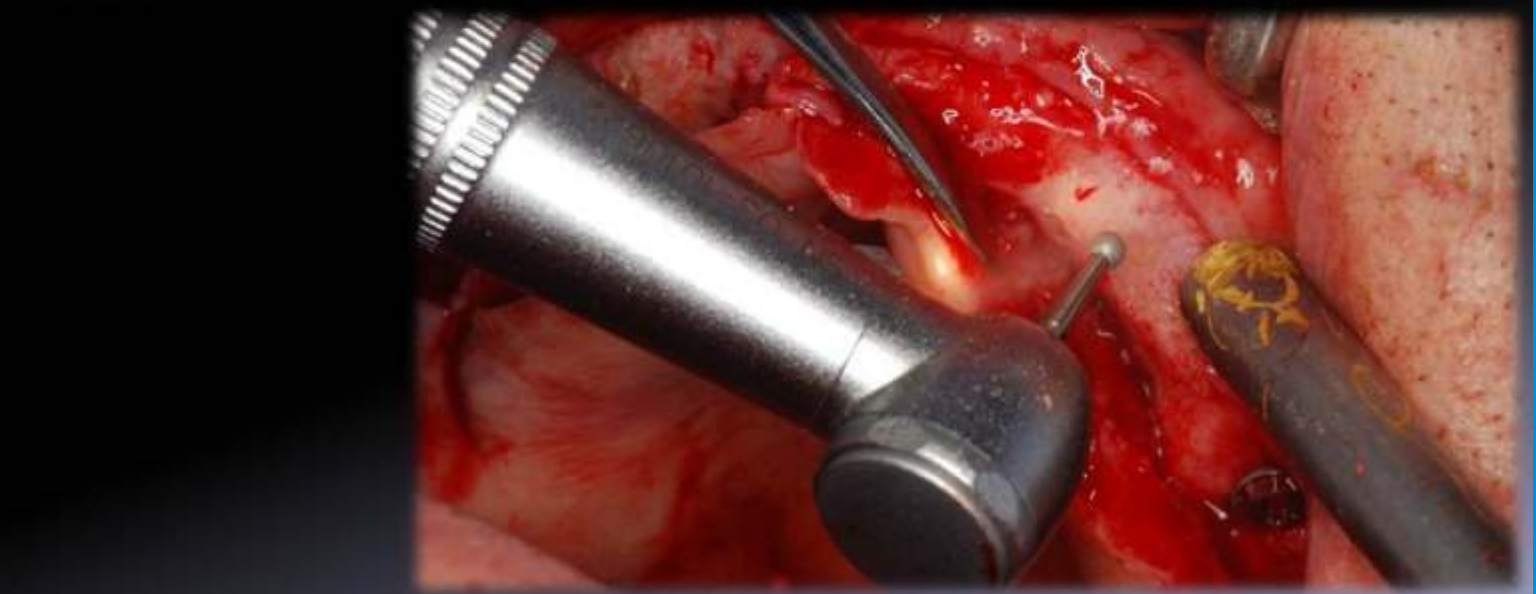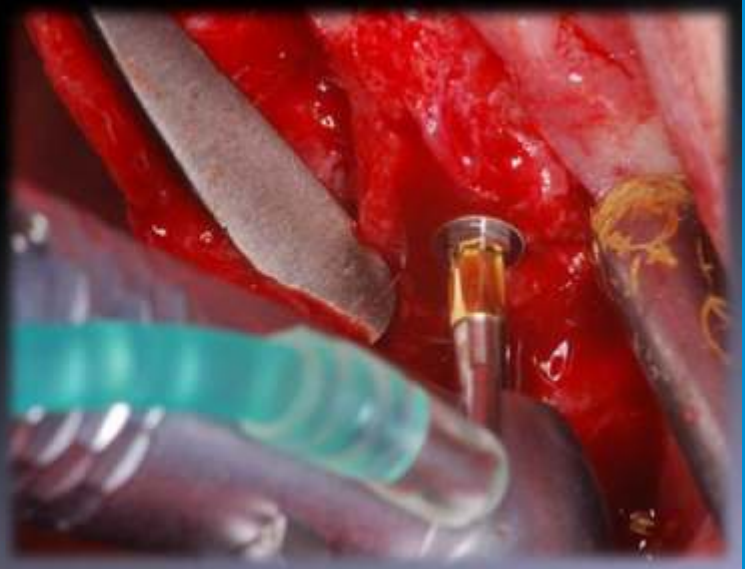


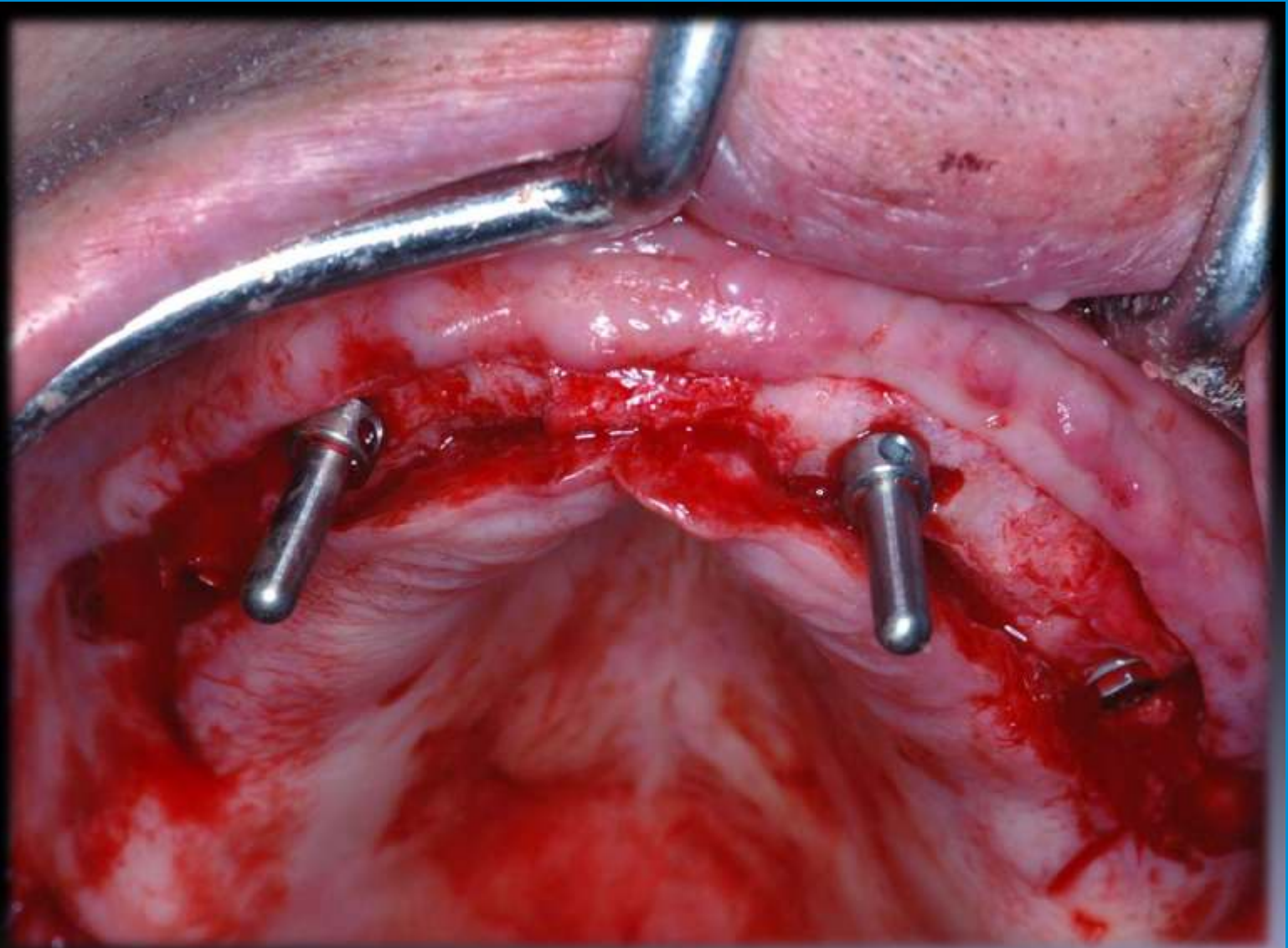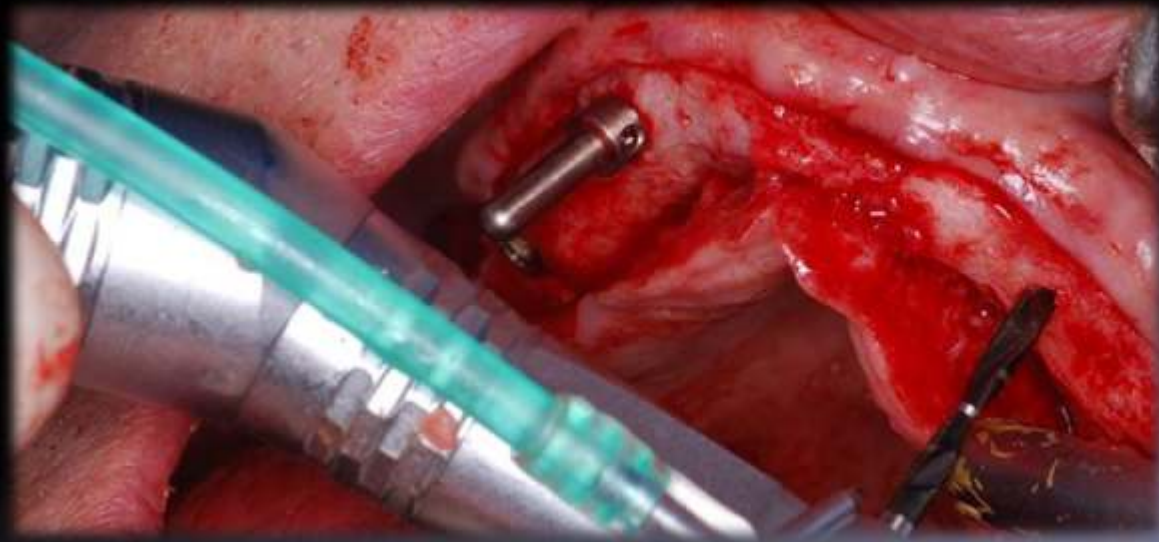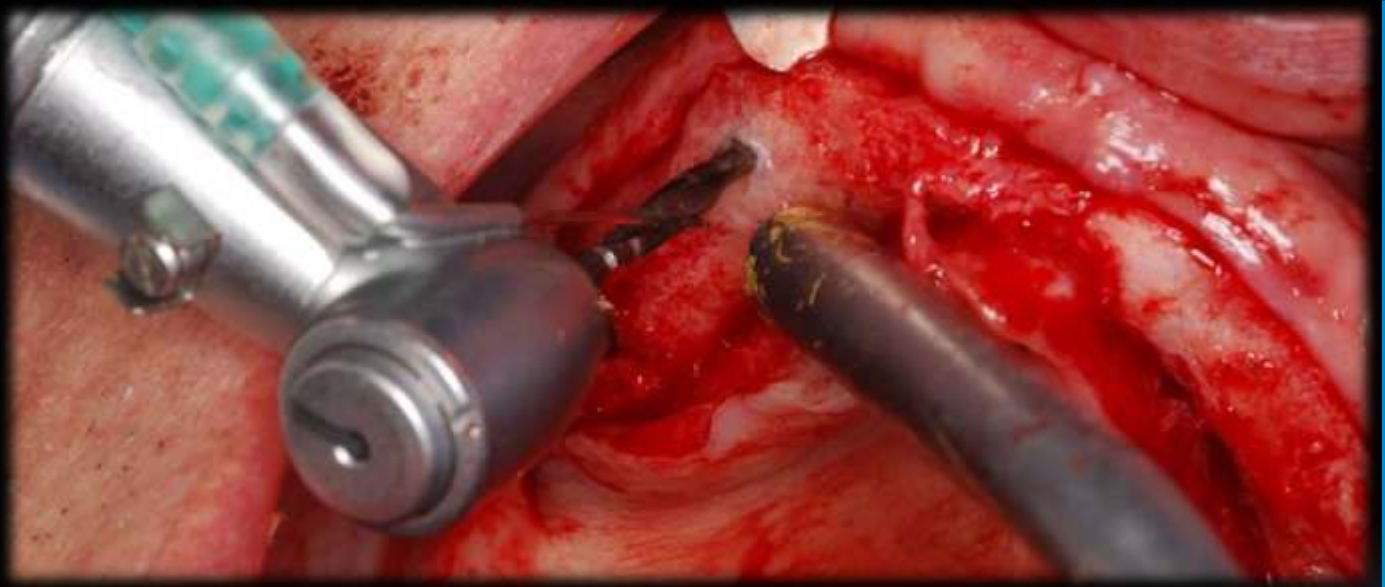

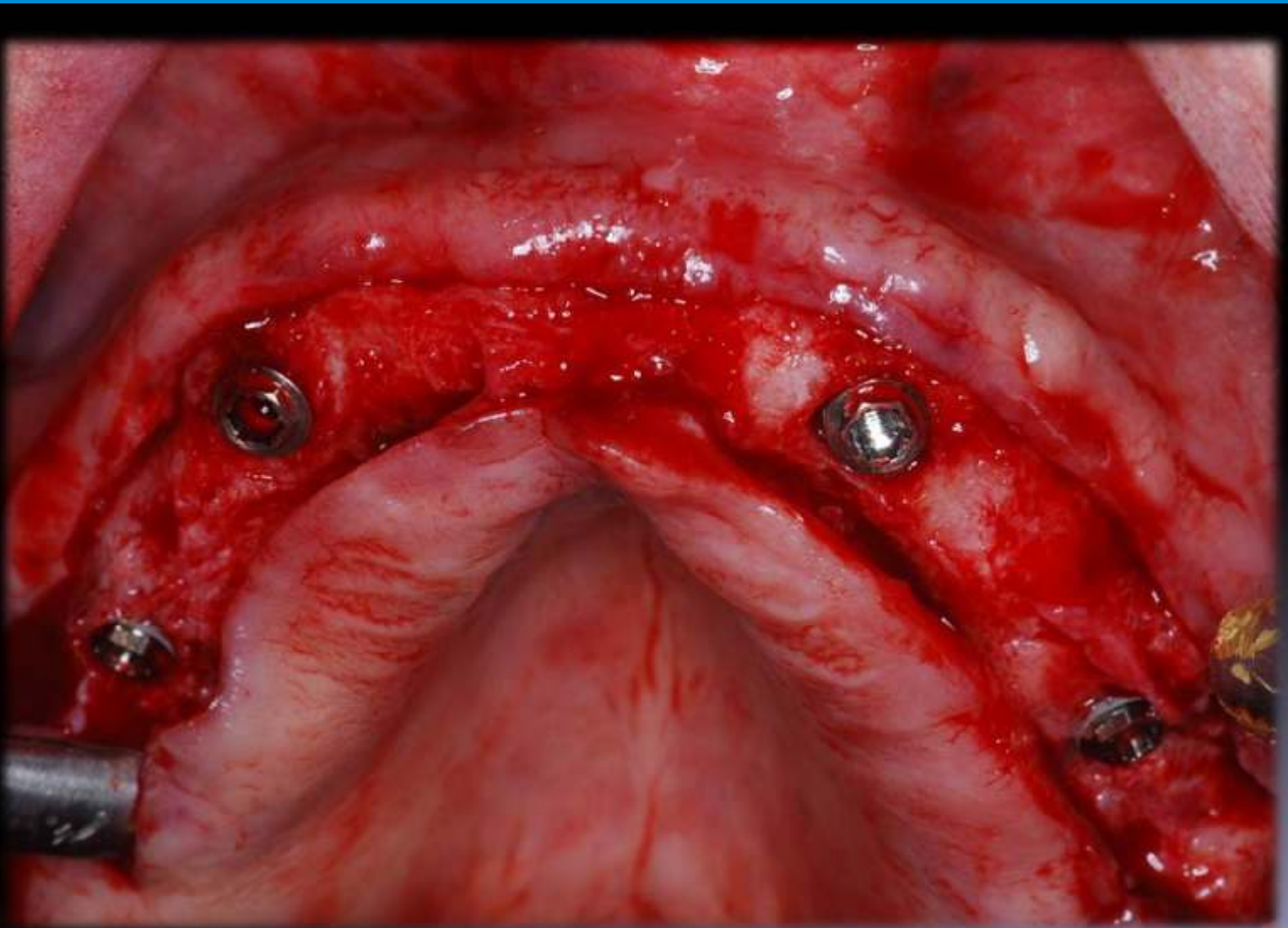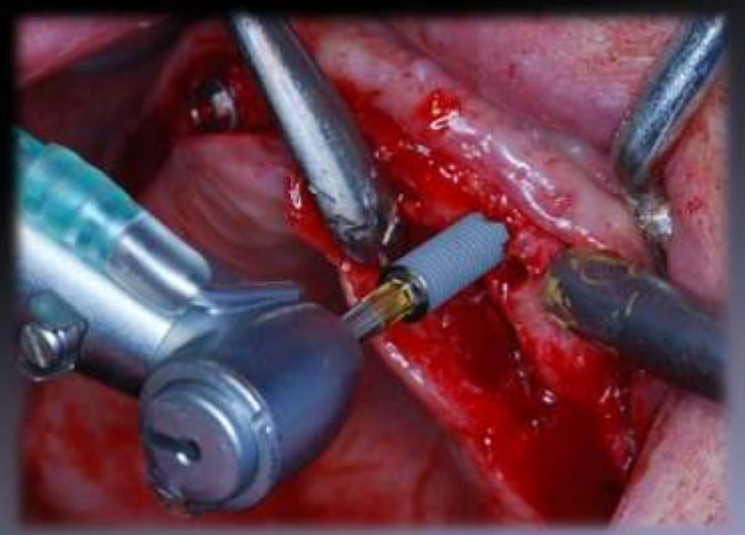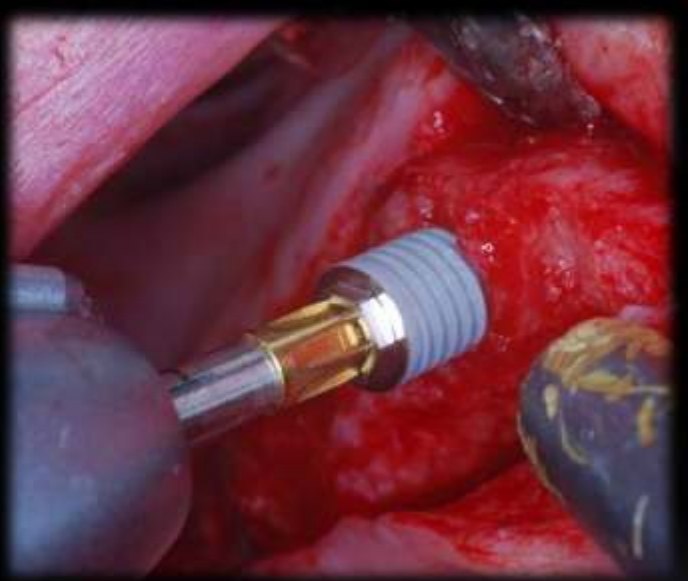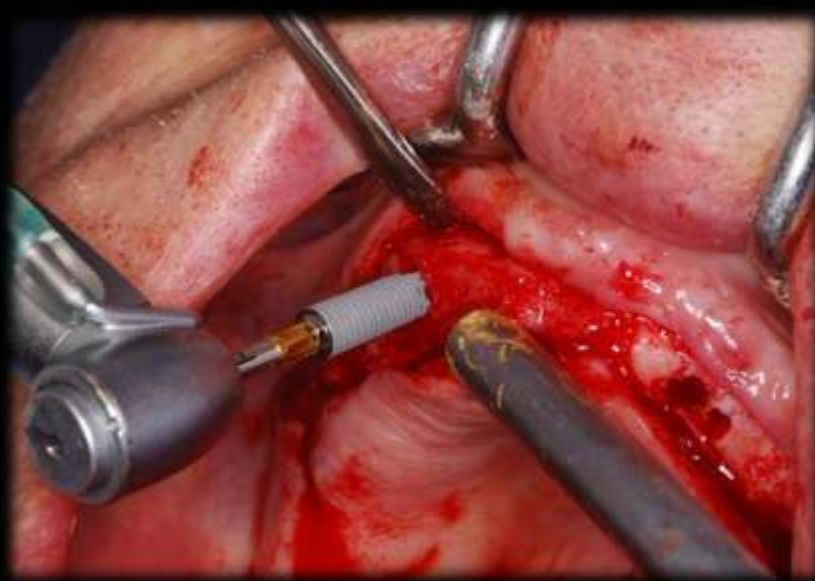





PIEZO-OSTEOPLASTICA CORONALE

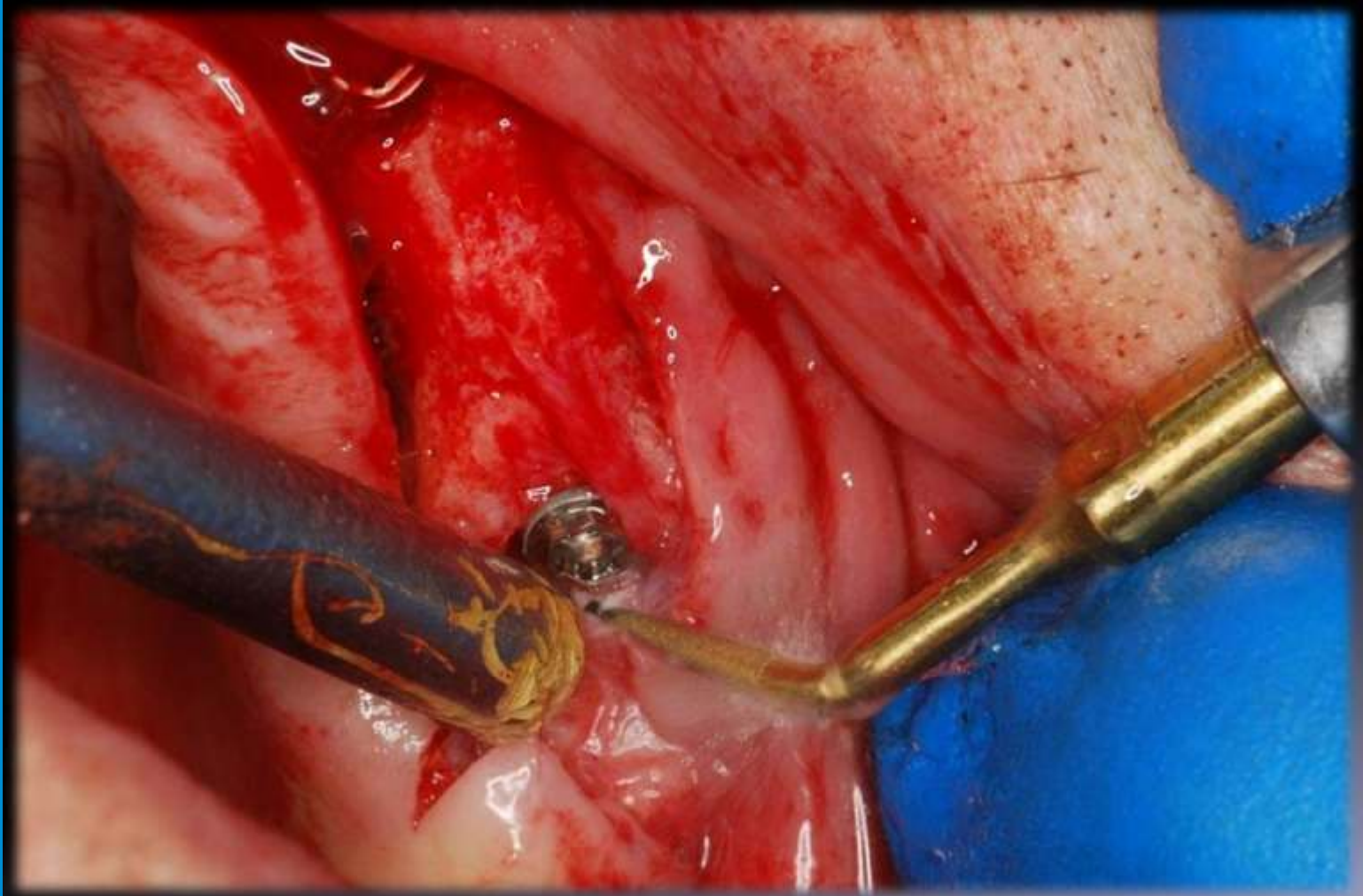


INSERIMENTO E CHIUSURA DEI MUA

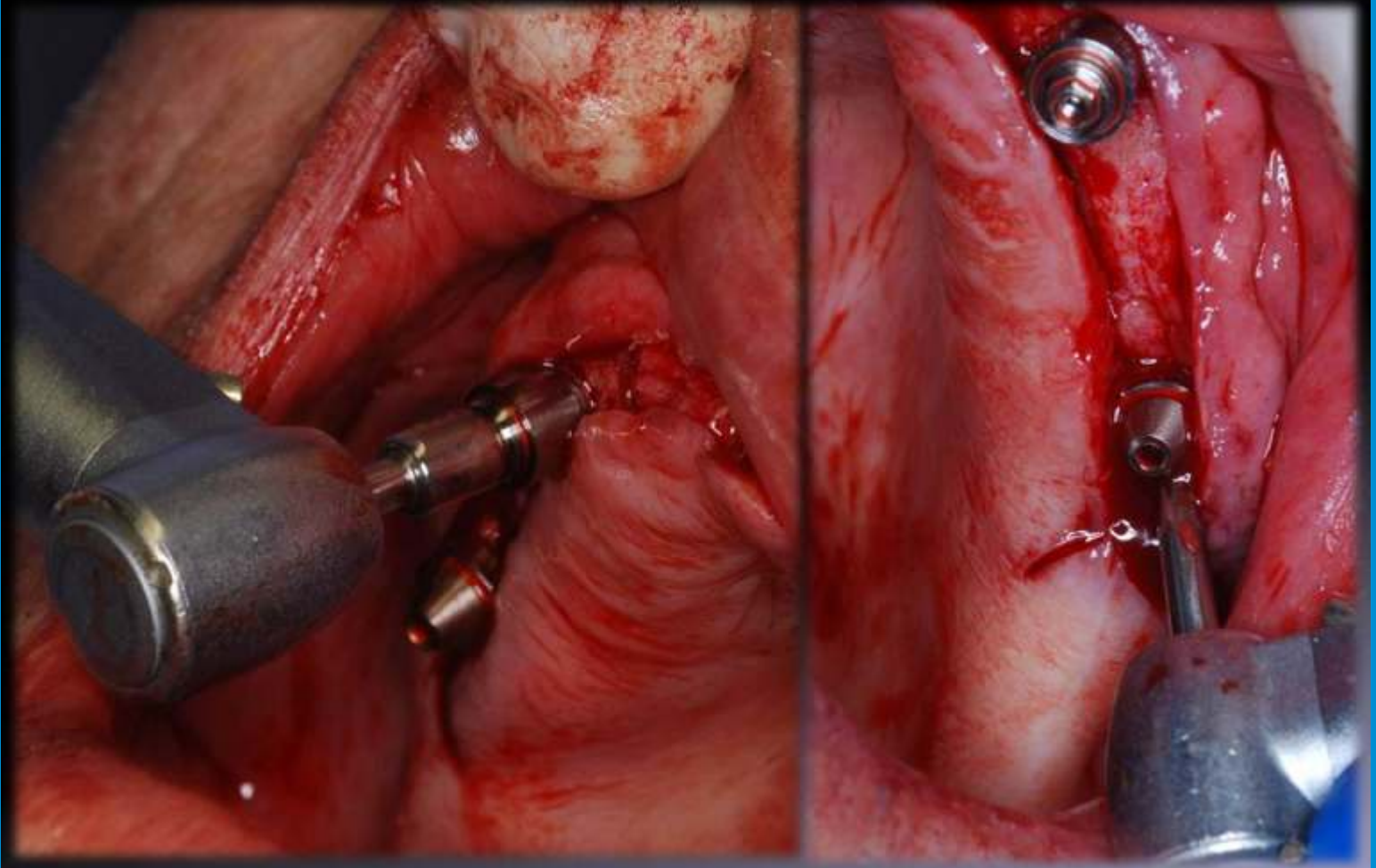


MUA IN POSIZIONE DEFINITIVA

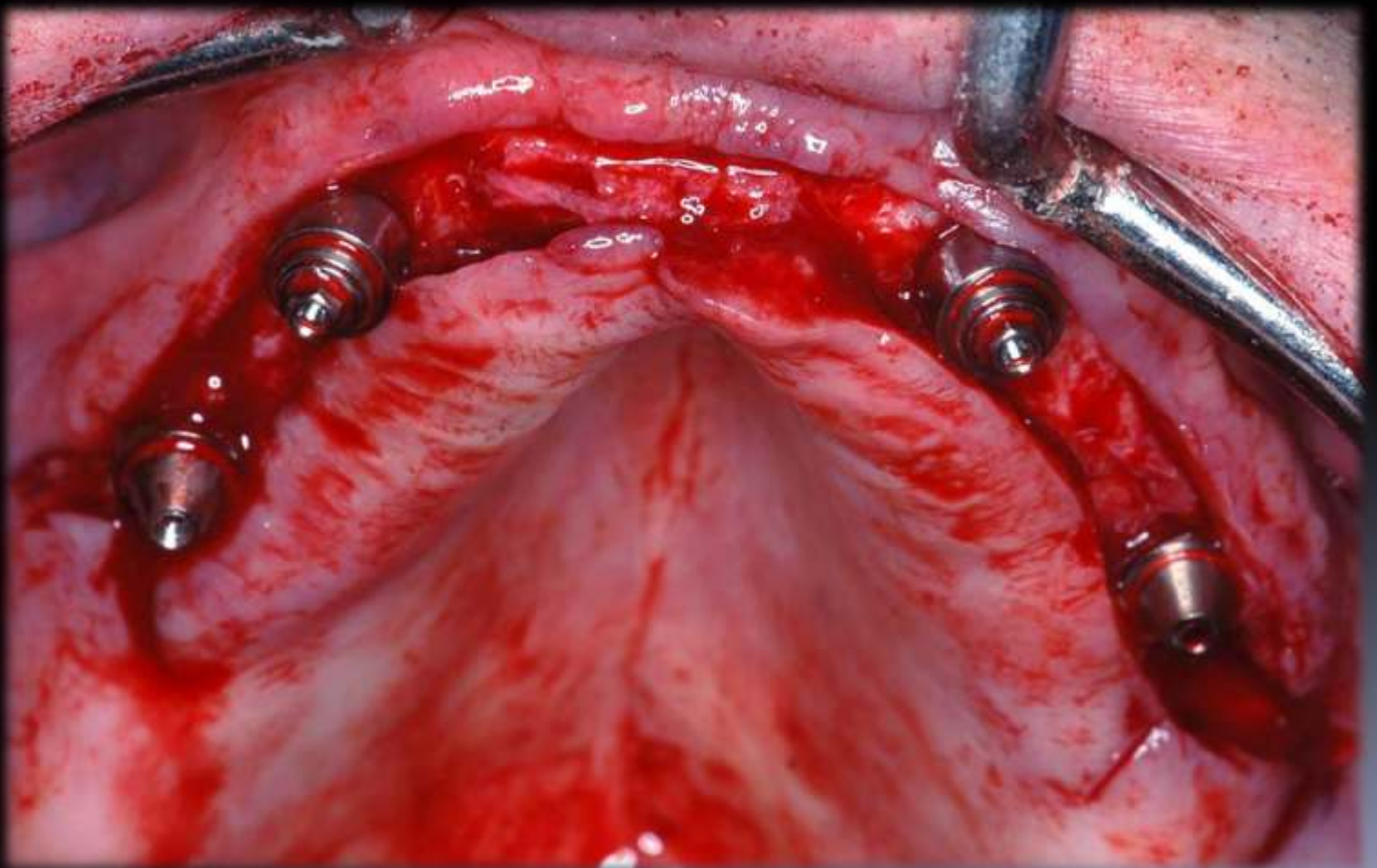

SUTURE A COLLARE SUI MUA




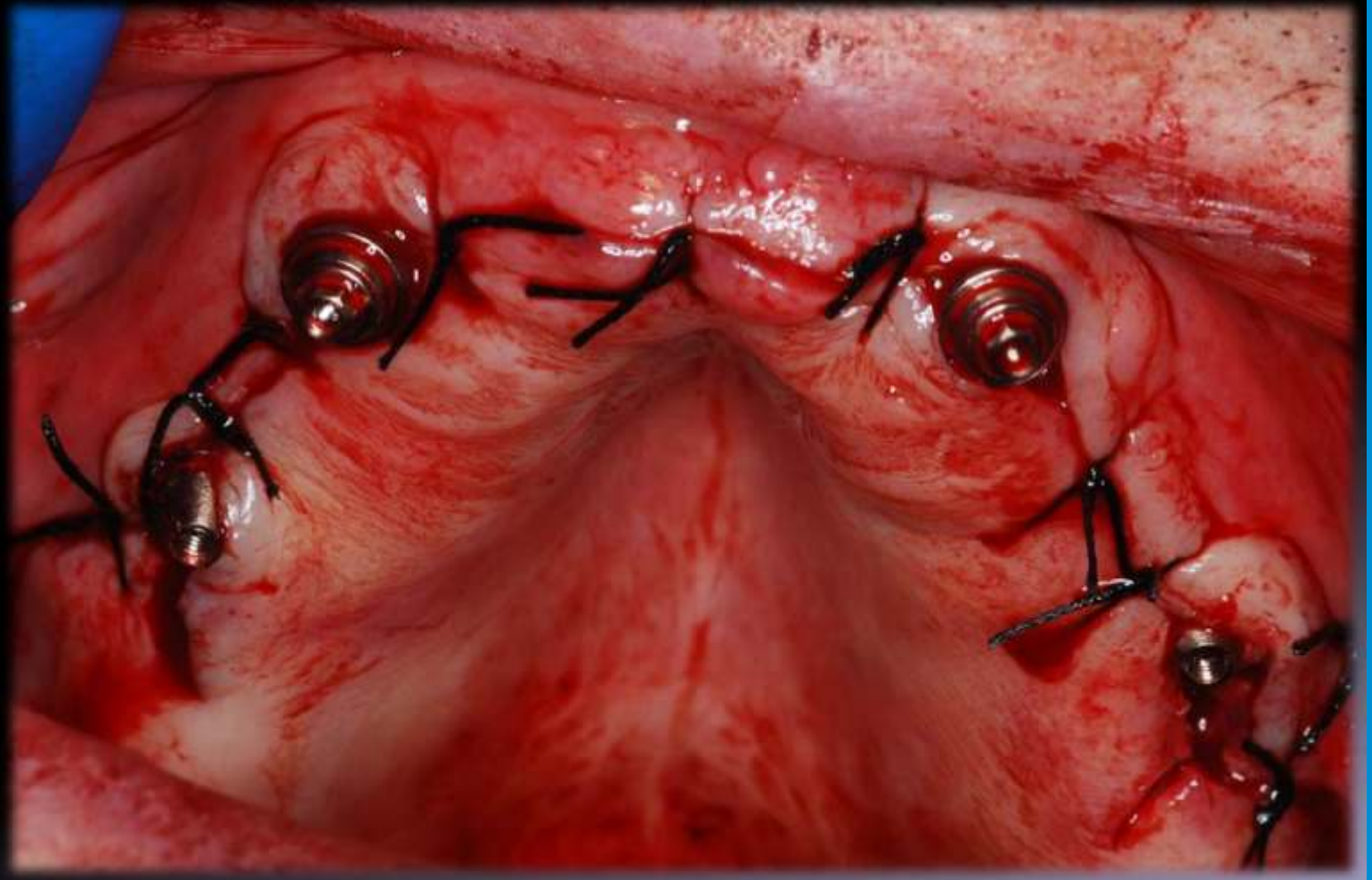


PILASTRI TEMPORANEI IN POSIZIONE

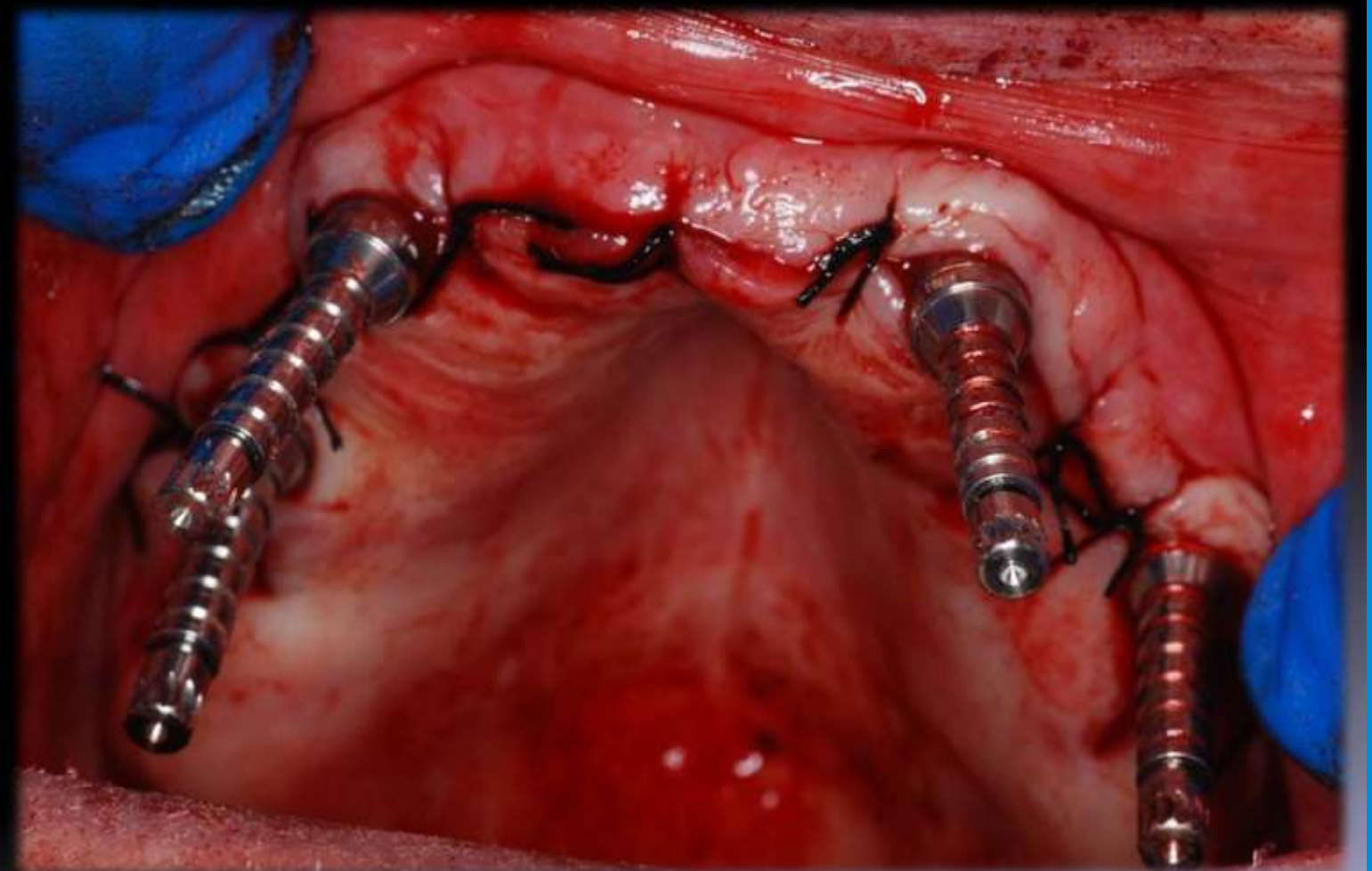

CUCCHIAIO INDIVIDUALE IN POSIZIONE



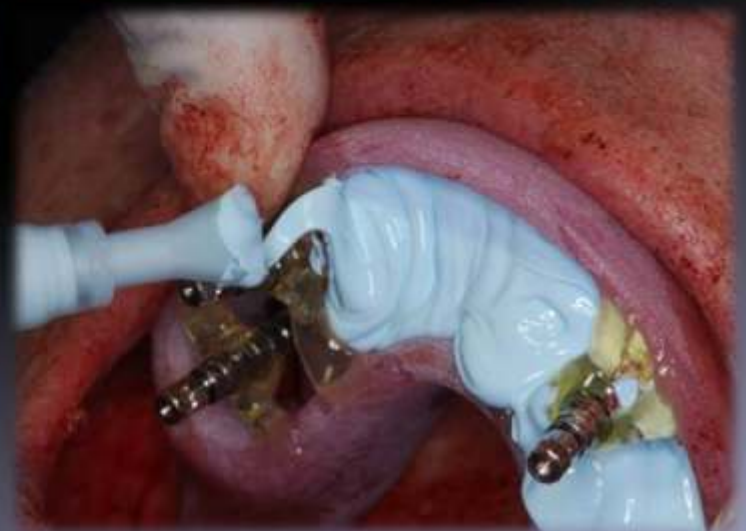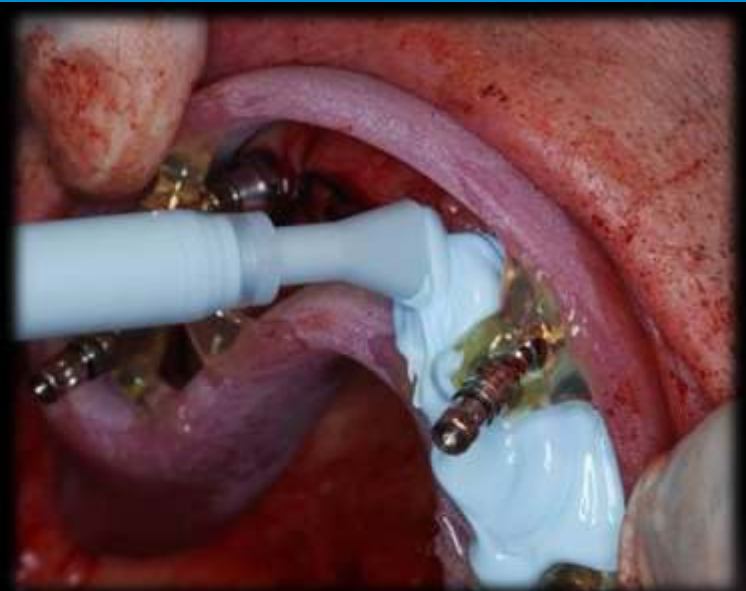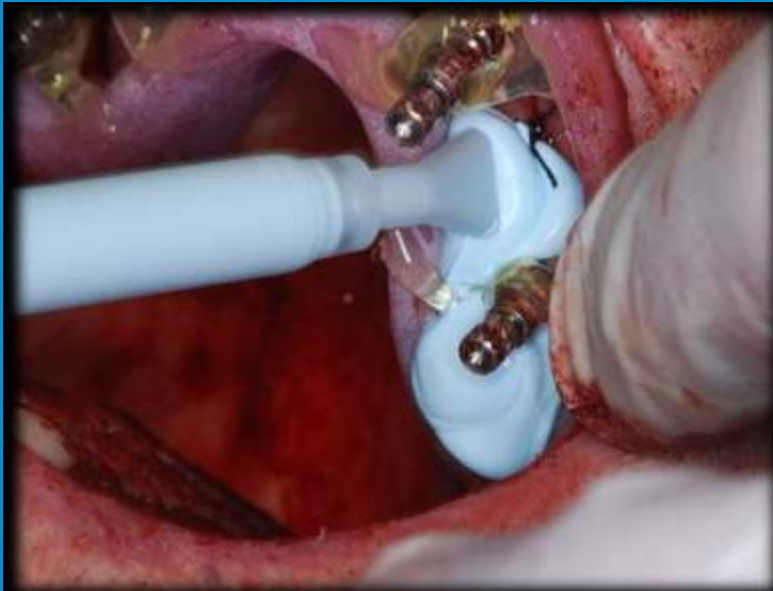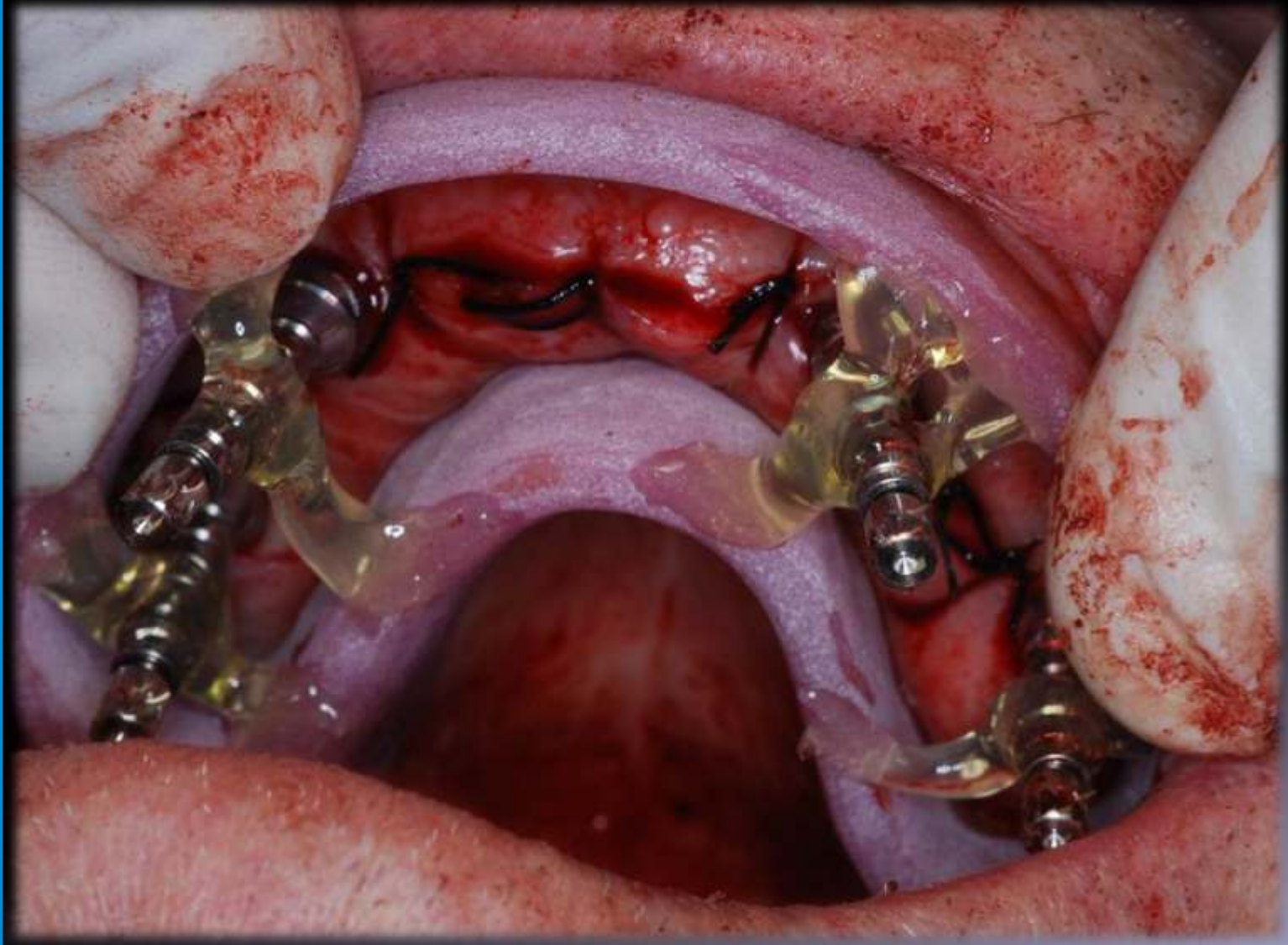



MODELLO MASTER CON ANALOGHI



BASETTA AVVITATA PER MASTICONE





RIMOZIONE CAPPETTE GUARIGIONE



RIMOZIONE CAPPETTE GUARIGIONE



PROVVISORIO IN POSIZIONE




CASE REPORT


ALL ON 4

JAW






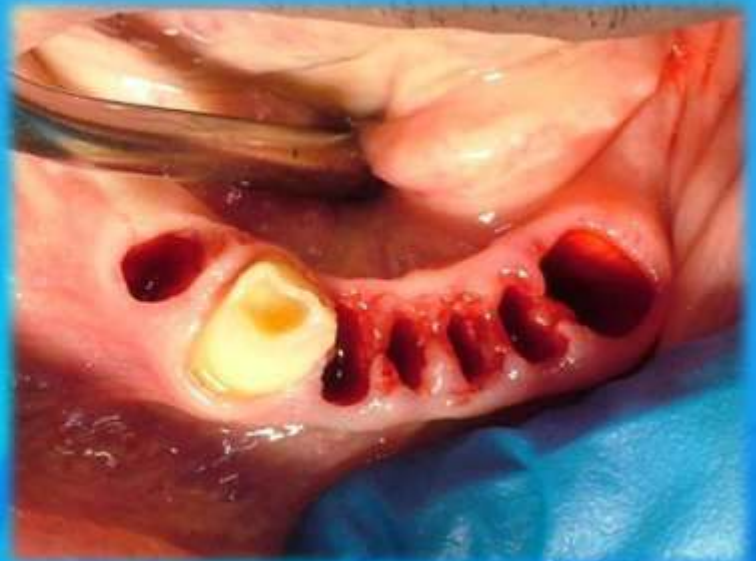

ESTRAZIONE

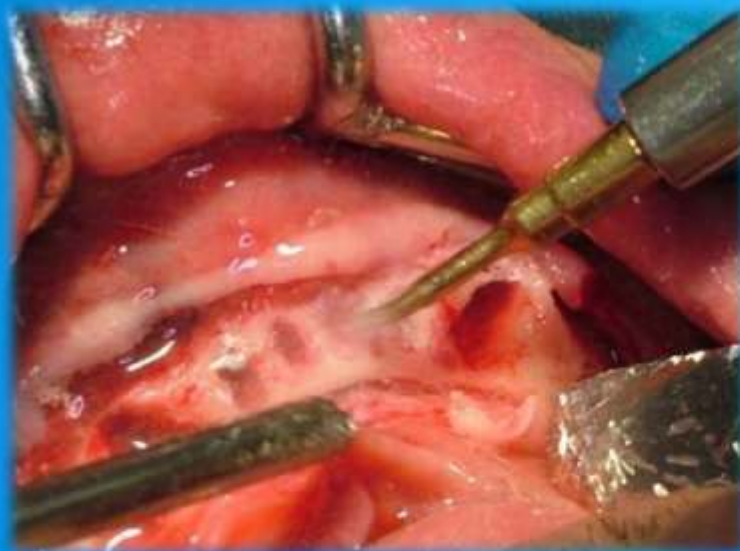

***BONIFICA SITI
POSTESTRATTIVI***

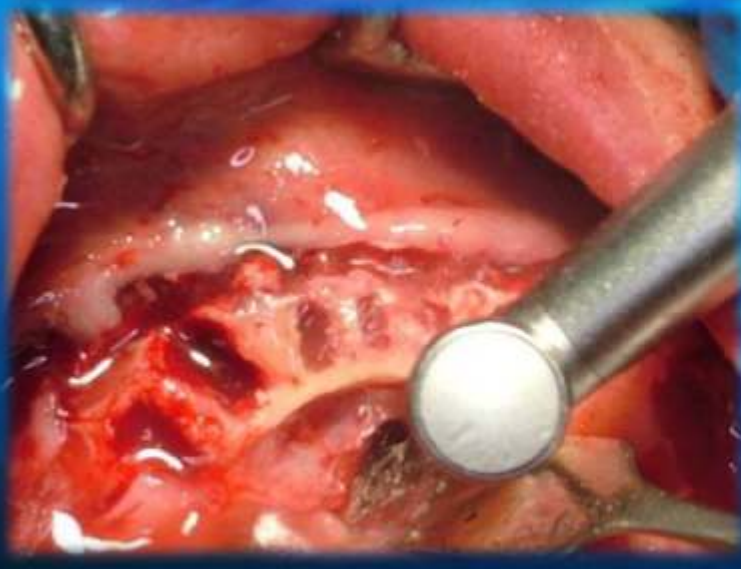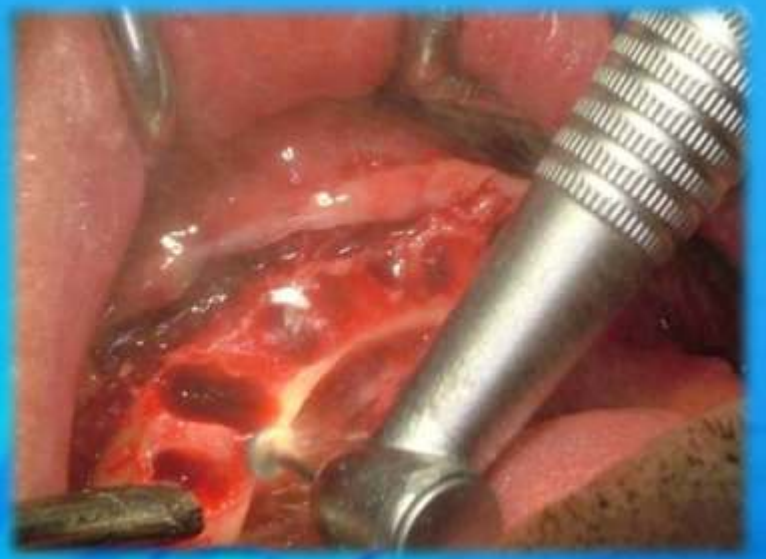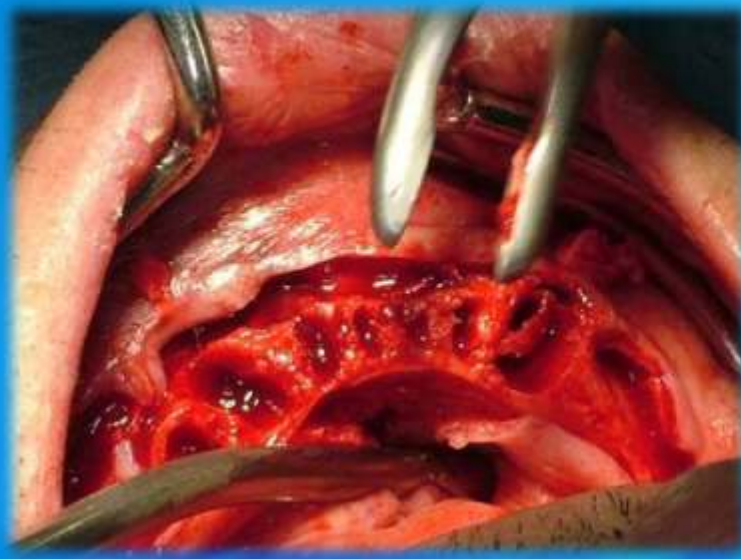

OSTEOPLASTICA





***EVIDENZIARE EMERGENZA
ALVEOLARE SIX***




***EVIDENZIARE EMERGENZA
ALVEOLARE DEX***



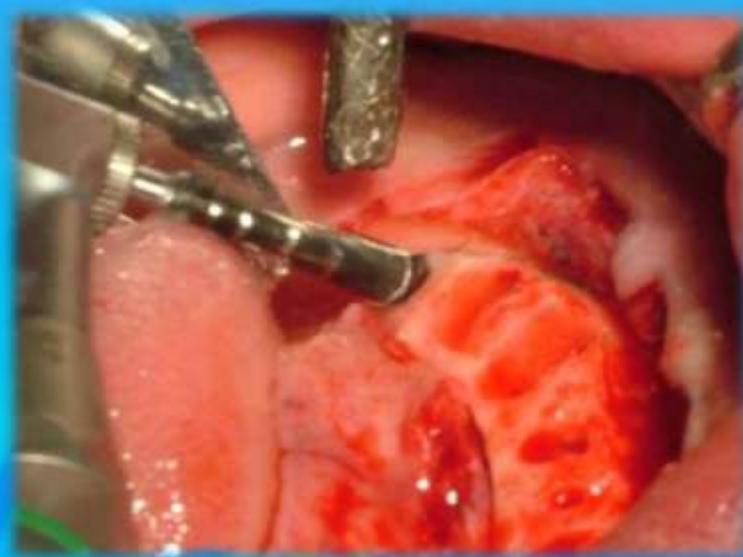
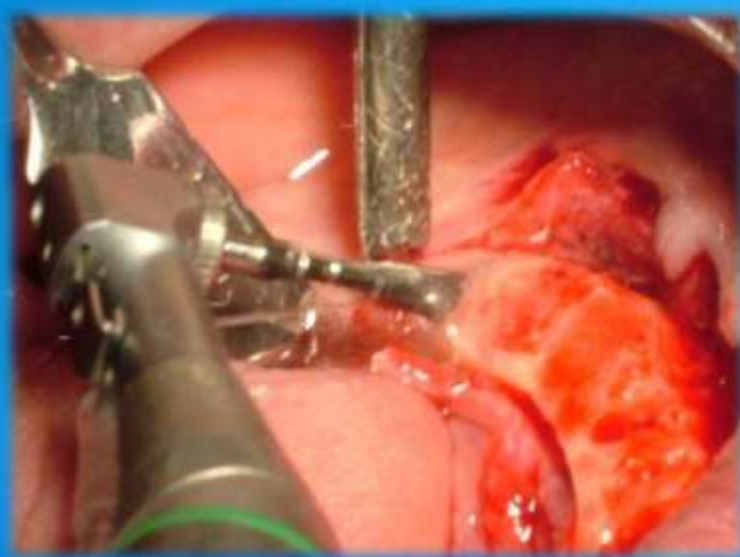


*SEQUENZA FRESE
SEDE POSTERIORE
SIX ANGOLO 30°*

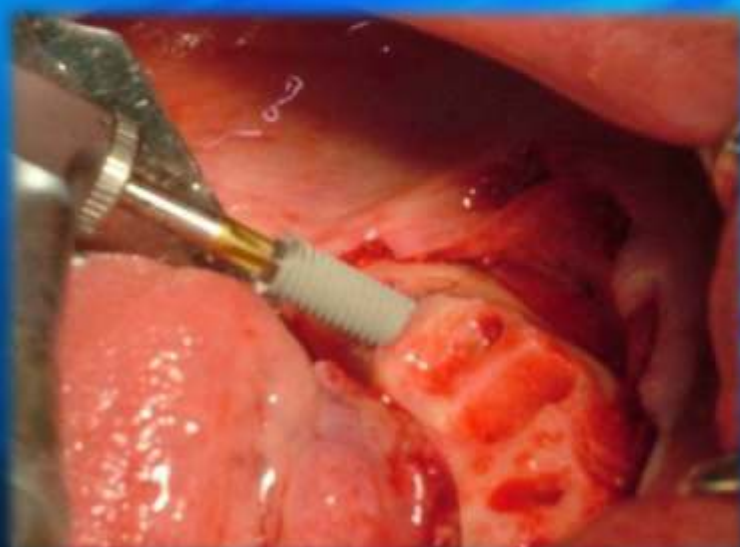




***SEQUENZA FRESE
SEDE POSTERIORE
DEX ANGOLO 30°***

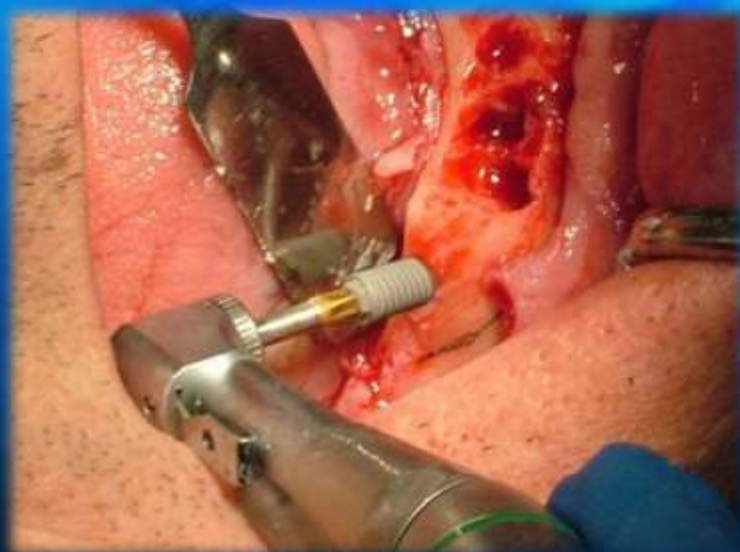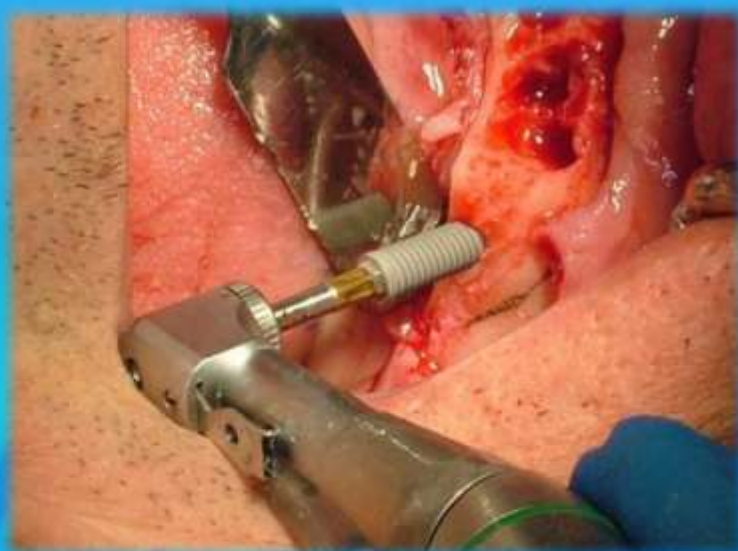

***INSERIMENTO
IMPIANTO
SEDE POSTERIORE
DEX ANGOLO 30°***

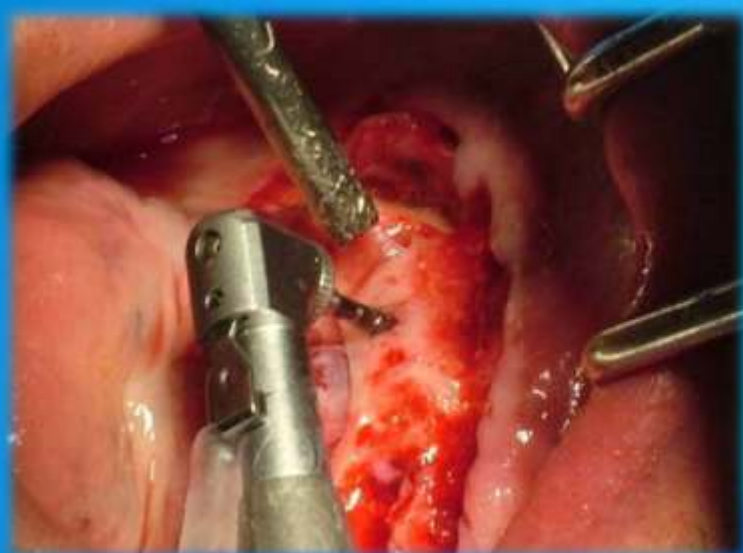

***SEQUENZA FRESE
SEDE ANTERIORE
ANGOLO 0°-17°***




***SEQUENZA FRESE
SEDE ANTERIORE
ANGOLO 0°-17°***



***INSERIMENTO
IMPIANTI
SEDE ANTERIORE***



***CONTROLLO
TORQUE
MIN 45 Ncm***

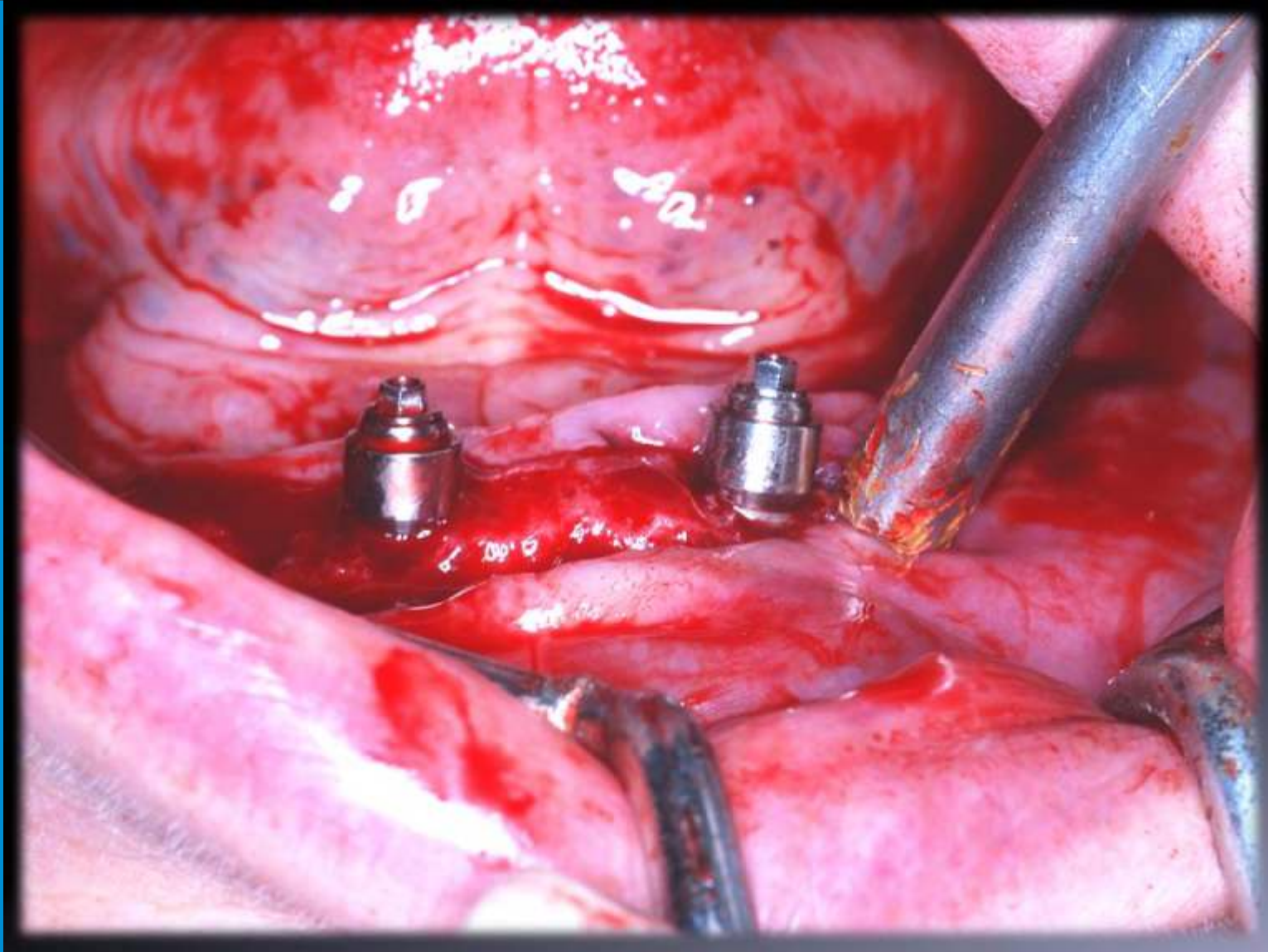

Avvitamento Anteriore MUA 0°




Avvitamento Anteriore MUA 0°



*Avvitamento Anteriore
Temporari*




*Avvitamento Posteriore
Six MUA 30°*

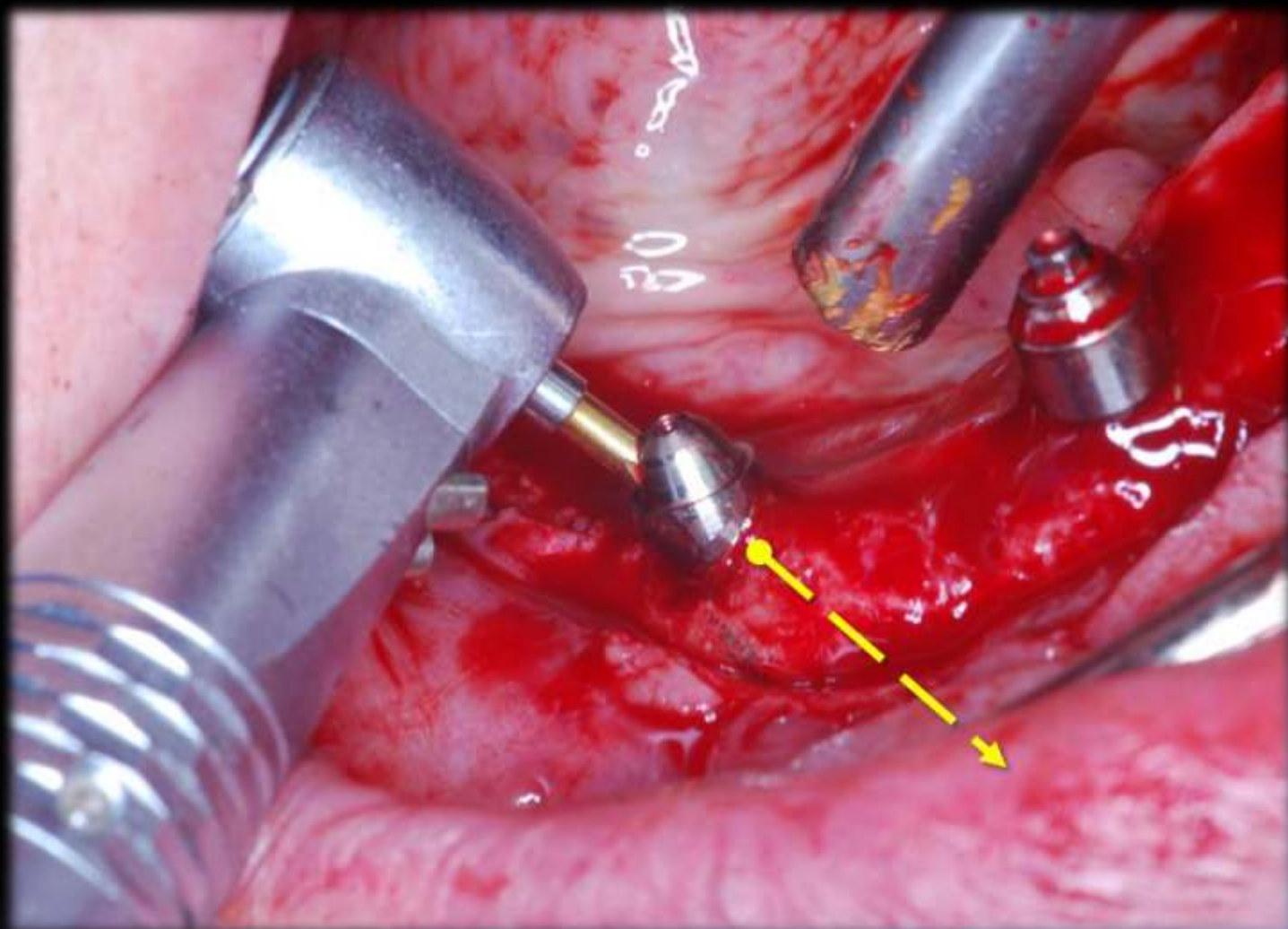

Avvitamento Posteriore Dex

Temporary 30°

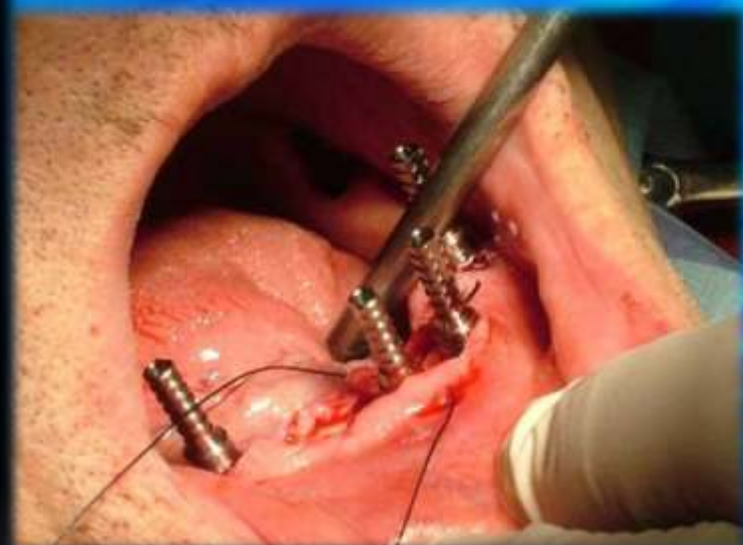



CUCCHIAIO INDIVIDUALE APERTO










*Avvitamento
Pilastrini Guarigione
Temporanei*

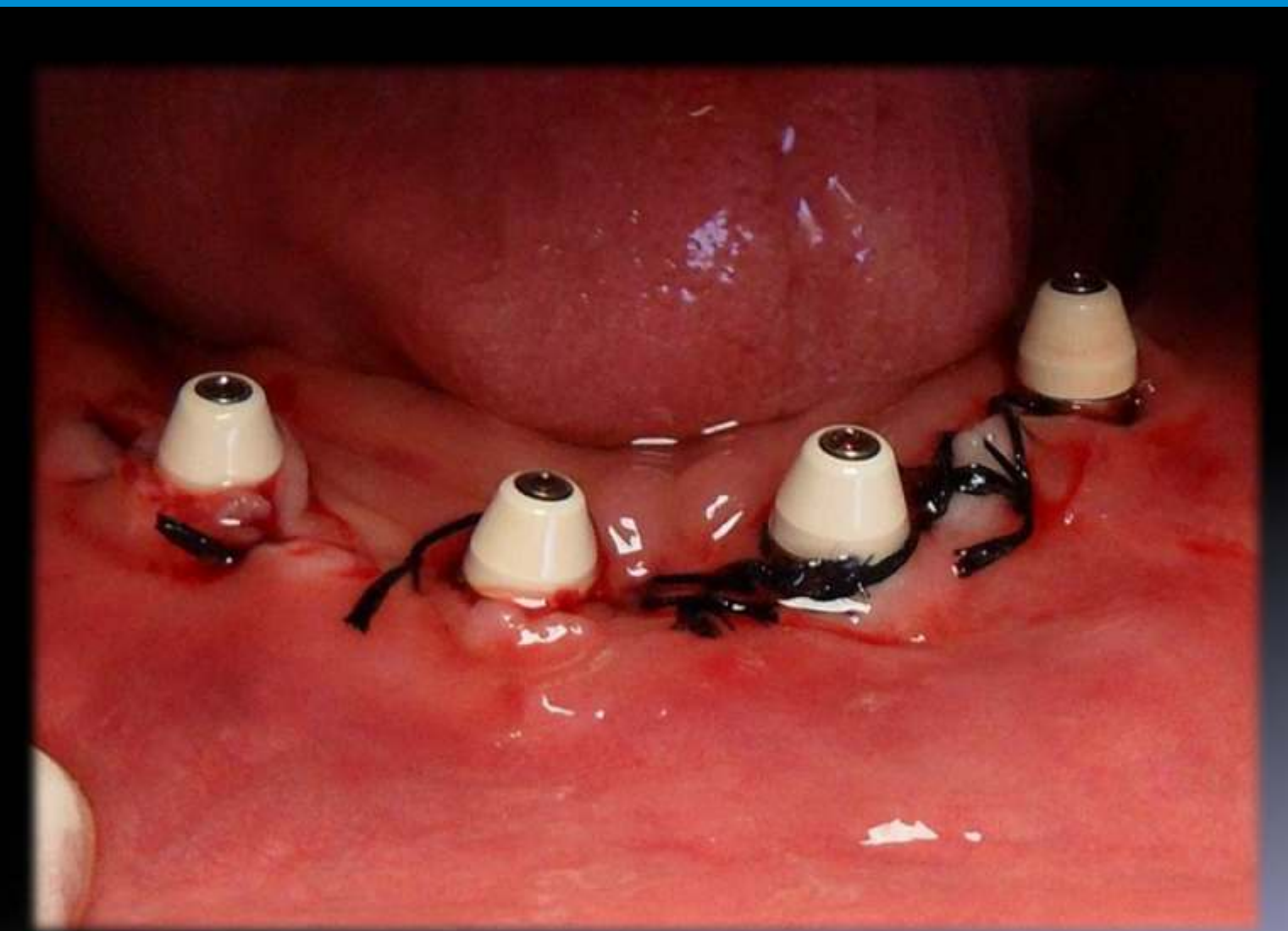



**COPIA DELLA PROTESI
IN RESINA TRASPARENTE**



**MASTICAZIONE E
POSIZIONE DI
RIFERIMENTO PER
IL MONTAGGIO IN
LABORATORIO**



**DATI
ULTERIORI
DI
REPERE**



